

Brailiant™ BI 40X

Guía de Usuario



Humanware™

see things. differently.

Brilliant™ BI 40X

Guía de Usuario

V 2.1

21 septiembre 2023

Copyright 2022. Todos los derechos reservados, HumanWare.

Esta Guía de Usuario está protegida por los derechos de autor de HumanWare, con todos los derechos reservados. La Guía de Usuario no puede copiarse total o parcialmente sin el consentimiento por escrito de HumanWare.

Contenido

1. Cómo empezar	7
1.1. Contenido de la caja	7
1.2. Descripción del Brailiant BI 40X	7
1.2.1. Cara superior	7
1.2.2. Borde frontal.....	7
1.2.3. Borde izquierdo.....	8
1.2.4. Borde derecho	8
1.2.5. Borde posterior	8
1.2.6. Parte inferior.....	8
1.3. Cargar el Brailiant BI 40X.....	8
1.4. Encendido y apagado	9
1.5. Ajuste del modo de reposo	10
1.6. Sobre el menú Acerca De	10
1.7. Acceso al Menú Principal	10
2. Navegación y uso de los menús.....	10
2.1. Navegación por el menú principal.....	10
2.2. Desplazamiento del texto en la línea braille.....	11
2.3. Uso del Menú de Contexto para funciones adicionales	11
2.4. Navegación por la inicial de las palabras	11
2.5. Uso de atajos/combinaciones de teclas para navegar.....	12
3. Uso de la aplicación Editor	13
3.1. Crear un archivo	13
3.2. Abrir un archivo	14
3.3. Guardado recientemente.....	14
3.4. Cerrar un archivo	14
3.5. Guardar un archivo de texto	14
3.6. Desplazamiento automático por el texto en el Editor	14
3.6.1. Modificar la velocidad de desplazamiento automático.....	15
3.7. Buscar texto en un archivo.....	15
3.7.1. Buscar y reemplazar texto	15

3.8.	Cortar, copiar y pegar texto	15
3.9.	Uso del modo de lectura.....	16
3.10.	Insertar fecha y hora.....	16
3.11.	Añadir, navegar y eliminar marcadores.....	17
3.11.1.	Insertar un marcador.....	17
3.11.2.	Navegar por los marcadores	17
3.11.3.	Eliminar marcadores	17
3.12.	Activar/desactivar indicadores de texto.....	17
3.13.	Tabla de comandos del Editor	18
4.	Uso de la aplicación KeyBrf.....	19
4.1.	Crear archivo.....	19
4.2.	Abrir archivo.....	20
4.3.	Guardado recientemente.....	20
4.4.	Cerrar archivo.....	20
4.5.	Guardar archivo braille	20
4.6.	Exportar un archivo braille a texto	20
4.7.	Utilizar auto desplazamiento en KeyBrf	21
4.7.1.	Modificación de la velocidad de desplazamiento automático	21
4.8.	Buscar texto en un archivo.....	21
4.8.1.	Buscar y reemplazar texto	21
4.9.	Cortar, copiar y pegar texto	22
4.10.	Uso del modo de lectura	22
4.11.	Añadir, navegar y eliminar marcadores.....	22
4.11.1.	Insertar marcador	22
4.11.2.	Navegar por marcadores.....	23
4.11.3.	Eliminar marcadores	23
4.12.	Activar/desactivar indicadores de texto.....	23
4.13.	Tabla de comandos de KeyBrf.....	23
5.	Uso del Lector de Libros	25
5.1.	Navegar por la Lista de libros.....	25
5.1.1.	Búsqueda de libros	26

5.1.2.	Acceso a los libros abiertos recientemente	26
5.1.3.	Gestión de los libros	26
5.2.	Navegación y acceso a información adicional de los libros	27
5.2.1.	Cambiar el nivel de navegación de los libros	27
5.2.2.	Navegación por página, título, porcentaje marcadores en un libro de texto	27
5.2.3.	Auto desplazamiento por el texto de los libros de la aplicación Biblioteca.....	27
5.2.4.	Buscar la posición actual en un libro.....	28
5.2.5.	Ir al principio o al final de un libro	28
5.2.6.	Buscar texto en un libro de texto	28
5.2.7.	Acceso a la información adicional de un libro	28
5.3.	Añadir, navegar, resaltar y eliminar marcadores.....	29
5.3.1.	Insertar un marcador.....	29
5.3.2.	Navegación por marcadores	29
5.3.3.	Resaltar marcadores.....	29
5.3.4.	Eliminar marcadores	30
5.4.	Tablas de comandos del Lector de Libros y de lectura.....	30
6.	Uso del modo Terminal	33
6.1.	Conexión y salida del Modo Terminal	33
6.1.1.	Comprobar la compatibilidad del Brailiant BI 40X.....	33
6.1.2.	Despertar su dispositivo iOS usando el Brailiant	33
6.1.3.	Conexión por USB.....	34
6.1.4.	Conexión por Bluetooth.....	34
6.2.	Papelera en modo terminal.....	35
6.3.	Alternar entre dispositivos conectados	35
6.4.	Conexiones USB en modo terminal	36
6.5.	Desactivar el teclado Perkins en modo terminal	36
7.	Uso del Gestor de Archivos.....	37
7.1.	Búsqueda de archivos	37
7.1.1.	Selección de una unidad en el Gestor de Archivos.....	37
7.1.2.	Acceso a la información de archivos y carpetas	37
7.1.3.	Mostrar la ruta del archivo actual.....	37

7.1.4.	Buscar archivos y carpetas.....	37
7.1.5.	Ordenar archivos o carpetas	38
7.2.	Editar archivos y carpetas.....	38
7.2.1.	Crear una nueva carpeta	38
7.2.2.	Renombrar archivos o carpetas.....	38
7.2.3.	Selección de archivos o carpetas para aplicar acciones adicionales.....	39
7.2.4.	Copiar, cortar y pegar archivos o carpetas	39
7.2.5.	Borrar archivos o carpetas.....	39
7.3.	Tabla de comandos del Gestor de Archivos	40
8.	Uso de la aplicación Calculadora	40
8.1.	Funcionamiento de la calculadora	41
8.2.	Tabla de comandos de la Calculadora.....	41
9.	Funcionamiento de la aplicación Fecha y Hora	41
9.1.	Visualización de la hora y la fecha	42
9.2.	Ajustar la fecha y la hora.....	42
10.	Menú de Opciones.....	42
11.	Ajustes de usuario.....	43
11.1.	Tabla de opciones de ajustes de usuario	43
11.2.	Añadir, modificar y borrar perfiles de idioma	44
11.2.1.	Añadir un perfil de idioma.....	44
11.2.2.	Modificar o borrar un perfil de idioma.....	45
11.3.	Síntesis de voz	45
11.3.1.	Selección de voz.....	46
11.3.2.	Tabla de ajustes de voz.....	46
11.4.	Utilizar una red Wi-Fi o Bluetooth.....	47
11.4.1.	Conexión a una red Wi-Fi.....	47
11.4.2.	Tabla de ajustes Wi-Fi.....	47
11.5.	Elegir las opciones del Modo Bluetooth	48
12.	Personalizar el Menú Principal.....	48
13.	Modo de una mano	49
14.	Cambiar idioma.....	49

15. Acceso y uso de los servicios en línea	50
15.1. Activar Bookshare y descargar libros	50
15.2. Configuración, gestión y sincronización de una cuenta NFB Newsline	50
15.3. NLS Bard	51
15.3.1. Conectarse a BARD por primera vez	51
15.3.2. Descarga de libros y revistas desde BARD.....	51
15.3.3. Leer un libro descargado	52
15.4. Daisy en línea.	52
15.4.1. Añadir cuenta Daisy.....	52
15.5. Importar configuración.....	52
15.6. Utilizar el servicio Daisy en línea	53
15.7. leer un libro descargado.....	53
16. Modo de Examen.....	53
17. Especificaciones técnicas	54
17.1. Componentes de navegación.....	54
17.2. Batería de larga duración.....	54
17.3. Conectividad.....	54
17.4. Portabilidad.....	55
18. Actualización del Brailiant BI 40X	55
18.1. Actualización manual del Brailiant BI 40X.....	55
18.2. Actualización del Brailiant BI 40X por USB o tarjeta SD.....	55
18.3. Función de comprobación automática de actualizaciones	56
19. Asistencia al cliente.....	56
20. Aviso y atribuciones de marca registrada.....	56
21. Acuerdo de licencia de usuario final.....	57
22. Garantía	57
Apéndice A: Resumen de comandos.....	58
Apéndice B: Tablas Braille.....	65
Español 8 puntos Braille Computerizado (Unicode - UTF8)	65

1. Cómo empezar

Bienvenido a su nueva línea Braille Brailiant™ BI 40X.

Esta guía de usuario contiene instrucciones para la orientación, uso, navegación y actualización del dispositivo. Para mayor información, diríjase a la [página de producto del Brailiant BI 40X](#) en la web de HumanWare o llame a su proveedor de HumanWare más cercano.

1.1. Contenido de la caja

La caja contiene los siguientes elementos:

- Línea Braille Brailiant™ X Series
- Cable USB-C a USB-A
- Adaptador de corriente
- Estuche de nylon con correa
- Guía de inicio en tinta y en Braille
- Instrucciones en braille para acceder a la guía de usuario

1.2. Descripción del Brailiant BI 40X

El Brailiant BI 40X tiene una línea Braille de 40 celdas, un teclado Braille estilo Perkins, dos barras espaciadoras, botón de Inicio y cuatro teclas de navegación.

1.2.1. Cara superior

La cara superior del Brailiant puede dividirse en dos partes: frontal y trasera.

La parte frontal consta de una línea braille que contiene 40 celdas braille y 40 sensores de movimiento del cursor. Cada sensor de cursor está asociado a la celda braille que se encuentra justo debajo de él. Cuando se edita un texto, pulsar uno de los sensores de cursor, mueve el cursor de edición a la celda braille asociada. En cualquier otro caso, al pulsar cualquier sensor de cursor activará el elemento seleccionado.

Cuando no esté editando texto, cualquier sensor de cursor activará el elemento seleccionado.

La parte trasera incluye un teclado braille al estilo Perkins en el que cada tecla representa un punto de una celda braille. Las teclas situadas debajo de la mano izquierda representan los puntos 1, 2, 3 y retroceso, donde el punto 1 se encuentra debajo del dedo índice y el retroceso debajo del dedo meñique. Las teclas situadas bajo la mano derecha representan los puntos 4, 5, 6 y Enter, donde el punto 4 se encuentra bajo el dedo índice y Enter bajo el meñique.

1.2.2. Borde frontal

En el borde frontal del Brailiant hay cinco botones. De izquierda a derecha, los botones son los siguientes:

- Tecla de Navegación Anterior

- Tecla de Desplazamiento Izquierda
- Botón de Inicio (forma circular) – sirve para volver al Menú Principal o salir del modo Terminal
- Tecla de Desplazamiento Derecha
- Tecla de Navegación Siguiente

1.2.3. Borde izquierdo

En el borde izquierdo, de adelante hacia atrás, se encuentran los siguientes elementos:

- Puerto USB-A
- Botón de encendido: mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para encender el dispositivo.
- LED verde – indica visualmente el estado del dispositivo
- Puerto USB-C – utilice el cable que viene con su Brailliant para conectarlo a una toma de corriente o a un PC.

1.2.4. Borde derecho

En el borde derecho, de adelante hacia atrás, se encuentran los siguientes elementos:

- Dos botones de volumen (actualmente inactivos)
- Conector de audio de 3.5 mm (actualmente inactivo)

1.2.5. Borde posterior

El borde trasero sólo contiene un puerto para tarjetas SD situado cerca del borde izquierdo del dispositivo. Este puerto permite insertar tarjetas SD para almacenamiento externo.

1.2.6. Parte inferior

En cada esquina de la parte inferior de su Brailliant hay una almohadilla antideslizante.

En el centro, más cerca del borde delantero, hay un rectángulo ligeramente rebajado con una textura diferente. En este rectángulo hay un adhesivo que contiene información en tinta sobre el hardware de su Brailliant. Encima de la pegatina, hay una etiqueta en braille que contiene el número de serie de su dispositivo.

Hacia la parte posterior izquierda del aparato se encuentra el compartimento de la batería. Está cerrado y asegurado con dos tornillos de cabeza Phillips.

1.3. Cargar el Brailliant BI 40X

Antes de utilizar su Brailliant, asegúrese de que está completamente cargado.

Conecte el extremo USB-C del cable de carga al puerto USB-C situado en el borde izquierdo de su Brailliant. Solo se requiere un esfuerzo mínimo y forzar la conexión podría dañar el cable o el dispositivo.

Conecte el extremo USB-A del cable de carga al adaptador de corriente y, a continuación, conecte el adaptador a una toma de corriente. Utilice el adaptador de corriente suministrado para obtener una carga óptima.

También puede cargar el dispositivo utilizando su ordenador y el cable de carga USB-A a USB-C, pero tenga en cuenta que este método de carga es más lento que la carga con un adaptador de corriente.

1.4. Encendido y apagado

El botón de encendido está en el borde izquierdo del Brailliant. Tiene forma ovalada con un punto en relieve en el centro.

Una vez que su dispositivo se haya cargado, para encender el Brailliant mantenga pulsado el botón de encendido durante aproximadamente 2 segundos. Notará una vibración rápida y aparecerá "starting" en la línea braille junto con una animación en círculos durante el arranque.

Unos instantes después de arrancar el dispositivo por primera vez, se le dará la bienvenida con un menú de selección de idioma. Pulse Enter para abrir la lista de idiomas, seleccione uno y pulse Enter para cerrar la lista. Las opciones del menú se verbalizarán mediante la síntesis de voz utilizando la voz seleccionada por defecto.

Otro elemento disponible es iniciar "modo terminal". Si prefiere que el Brailliant se inicie en modo terminal a partir de un apagado completo, puede activarlo pulsando Enter. Consulte la sección de configuración de usuario para obtener más información sobre la activación o desactivación del inicio en modo terminal.

Cierre el cuadro de diálogo una vez completados los cambios.

Tras unos segundos, la puesta en marcha se completa y aparece "editor" en la pantalla braille. Su Brailliant ya está listo para ser utilizado.

Si activa el inicio en modo terminal, el Brailliant se situará en "conexión USB".

Para apagar, mantenga pulsado el botón de encendido durante aproximadamente 2 segundos. Aparecerá un mensaje de confirmación en la línea braille. Seleccione Aceptar con las teclas de Navegación Anterior o Siguiente y después pulse Enter o un sensor de cursor.

También puede seguir estos pasos para apagar el Brailliant:

1. Pulse A para acceder a la opción de menú Apagar.
2. Pulse Enter o un sensor de cursor.
3. Seleccione Aceptar con las teclas de Navegación Anterior o Siguiente.
4. Pulse Enter o un sensor de cursor.

1.5. Ajuste del modo de reposo

Para preservar la batería, el Brailliant pasa al modo de reposo tras 5 minutos de inactividad. Puede ajustar su duración a través de las Opciones. También puede poner manualmente su dispositivo en modo de reposo pulsando brevemente el botón de encendido.

Para despertar el dispositivo, pulse el botón de encendido.

1.6. Sobre el menú Acerca De

El menú "Acerca de" proporciona diversa información sobre su dispositivo, como la versión, el modelo, el número de serie, las licencias y los derechos de autor.

Para abrir el menú Acerca De:

1. Vaya al menú principal.
2. Seleccione Ajustes.
3. Pulse Enter.
4. Vaya a la opción Acerca De.
5. Pulse Enter.

También puede usar el atajo de teclado Espacio + I para abrir el menú de Acerca De.

1.7. Acceso al Menú Principal

El menú principal de KeySoft es el Menú Principal por defecto de su Brailliant. Desde el menú principal puede acceder a todas las aplicaciones KeySoft Lite. Al arrancar su Brailliant o cerrar una aplicación, vuelve automáticamente a este menú.

En cualquier momento puede volver al menú principal simplemente pulsando el botón de inicio de su Brailliant (el botón en forma circular situado en el centro del borde frontal de su Brailliant). También puede utilizar el comando Ir al menú principal en el teclado pulsando ESPACIO y los puntos 1 2 3 4 5 6.

2. Navegación y uso de los menús

KeySoft Lite es el corazón de su Brailliant BI 40X, soportando todas las aplicaciones que incorporan su línea braille. El menú principal de KeySoft también puede ser personalizado, lo que le permitirá ocultar y mostrar las aplicaciones del menú principal. Puede encontrar más información sobre cómo personalizar su menú principal en la sección [Personalizar el menú principal de KeySoft](#).

2.1. Navegación por el menú principal

El menú principal contiene los siguientes elementos:

- Terminal
- Editor: KeyPad

- Editor braille: KeyBrf
- Victor Reader
- Gestor de Archivos
- Calculadora
- Fecha y Hora
- Ajustes
- Servicios En Línea
- Guía de Usuario
- Apagar

Pulse las teclas de Navegación Anterior o Siguiente para desplazarse por la lista hasta el elemento de menú que desee. A continuación, pulse Enter o un sensor de cursor para acceder a él.

Puede volver al menú principal en cualquier momento pulsando el botón de Inicio o Espacio con los seis puntos.

2.2. Desplazamiento del texto en la línea braille

A menudo, el texto de la línea braille es demasiado largo para caber en una sola línea. Para leer toda la frase, desplácese o "haga una panorámica" del texto hacia delante o hacia atrás pulsando las teclas de desplazamiento Izquierda y Derecha del Brailiant. Las teclas de desplazamiento Izquierda y Derecha son las que se encuentran a ambos lados del botón de Inicio en el borde frontal del dispositivo.

2.3. Uso del Menú de Contexto para funciones adicionales

El Menú de Contexto contiene todas las acciones disponibles de la aplicación KeySoft en la que se encuentre trabajando actualmente, así como sus comandos asociados. Puede ser muy útil cuando ha olvidado cómo hacer un comando específico.

Para activar el Menú de Contexto, pulse Espacio + M. Se abrirá un menú con una lista de acciones que puede realizar en ese momento. Desplácese por el menú hasta la acción deseada y pulse Enter o un sensor de cursor.

Pulse Espacio + E para salir del Menú de Contexto.

2.4. Navegación por la inicial de las palabras

La mayoría de las veces puede saltar a un elemento de un menú escribiendo la primera letra de ese elemento. Al hacerlo, el foco se desplaza automáticamente al primer elemento de la lista que empieza por esa letra. Si se escribe la misma letra dos veces, el foco se desplaza al segundo elemento de la lista que empieza por esa letra, y así sucesivamente.

Por ejemplo, para ir al menú de Ajustes en el Brailiant, se escribe la letra "a" con el teclado.

Tenga en cuenta que las aplicaciones de KeySoft que se encuentran en el menú principal están optimizadas para la navegación con su letra inicial.

También es posible cambiar fácilmente entre aplicaciones sin necesidad de volver al menú principal. Siempre que conozca la primera letra de la aplicación que desea abrir, pulse la letra junto con Enter y Retroceso.

Por ejemplo, para abrir la aplicación Editor: KeyPad, escriba la letra 'E' con Enter + retroceso.

2.5. Uso de atajos/combinaciones de teclas para navegar

Como su nombre indica, los atajos, también conocidos como combinaciones de teclas, facilitan la navegación rápida por un menú o un archivo.

Los atajos más utilizados en el Brailiant BI 40X se indican en la Tabla 1.

Tabla 1: Tabla de atajos/combinaciones de teclas

Acción	Atajo o combinación de teclas
Activar el elemento seleccionado	Enter o un sensor de cursor
Escapar o volver	Espacio + E
Elemento anterior	Tecla de navegación Anterior o Espacio + Punto 1
Elemento siguiente	Tecla de navegación Siguiente o Espacio + Punto 4
Saltar a cualquier elemento de una lista	Escribir la inicial del elemento o aplicación
Desplazamiento a la izquierda o a la derecha	Tecla de desplazamiento Izquierda o Derecha
Ir al principio	Espacio + Puntos 1-2-3
Ir al final	Espacio + Puntos 4-5-6
Alternar el grado braille	Retroceso + G
Cambiar perfil de idioma	Enter + L
Nivel de batería	Enter + P
Menú de contexto	Espacio + M
Menú principal	Espacio + Puntos 1-2-3-4-5-6 o botón de Inicio
Información del sistema	Espacio + I
Hora	Enter + T
Fecha	Enter + D
Expulsar medio	Enter + E
Ajustes	Espacio + O

Acción	Atajo o combinación de teclas
Crear una nota rápida	Retroceso + N
Crear una nota rápida de braille	Retroceso + B
Activar/desactivar la síntesis de voz	Espacio + tecla de navegación anterior
Aumentar velocidad de la voz	Enter + punto 5
Disminuir velocidad de la voz	Enter + punto 2
Abrir modo terminal	Retroceso + Enter + T
Abrir Editor	Retroceso + Enter + E
Abrir Victor Reader	Retroceso + Enter + V
Abrir Gestor de archivos	Retroceso + Enter + F
Abrir Calculadora	Retroceso + Enter + C
Abrir Bookshare	Espacio + enter + B
Abrir Nfb newslne	Espacio + enter + W
Abrir NLS bard	Espacio + Enter + N

Nota: Todos los comandos que incluyan Enter o Retroceso deben añadir la barra espaciadora si se utiliza el braille computerizado.

3. Uso de la aplicación Editor

El Editor es una aplicación que permite abrir, editar y crear archivos de texto en el Brailiant. Puede abrir archivos .docx, .doc, .txt, .brf, .brl, .pdf, .ban y .bra con el Editor. Los archivos creados o modificados se guardan como un archivo .txt.

Para abrir el Editor, pulse la tecla de navegación Siguiendo hasta llegar a Editor o pulse 'e' en el menú principal y, a continuación, pulse Enter o un sensor de cursor.

El Editor abre un submenú que incluye Crear archivo, Abrir archivo, Guardado recientemente, Ajustes del editor y Cerrar.

3.1. Crear un archivo

Hay varias maneras de crear un archivo dependiendo de su ubicación en el dispositivo.

- Si está en el menú del Editor, seleccione Crear archivo y pulse Enter o un sensor de cursor.
- En el Menú de Contexto, seleccione y active el menú Archivo, y luego Crear archivo.
- También puede crear de forma rápida un nuevo archivo si pulsa Retroceso + N desde cualquier lugar del dispositivo.

El cursor es visible entre dos corchetes braille. Puede empezar a escribir en su nuevo archivo.

3.2. Abrir un archivo

Si está en el menú del Editor, seleccione Abrir archivo y pulse Enter o un sensor de cursor. Alternativamente, puede pulsar Retroceso + O y, a continuación, seleccione el archivo que desee abrir con las teclas de navegación Anterior y Siguiente.

Tenga en cuenta que el Brailiant puede mostrar un mensaje de error cuando se abre un archivo PDF. Esto suele ocurrir cuando el archivo contiene imágenes en lugar de texto.

3.3. Guardado recientemente

Puede abrir una lista de los diez últimos documentos que haya guardado previamente para acceder rápidamente a ellos.

Para abrir una lista de los diez archivos más recientes, seleccione la aplicación KeyPad en el menú principal. Utilice las teclas de navegación Anterior o Siguiente hasta llegar a los archivos guardados recientemente y pulse Enter.

Puede desplazarse por los diez archivos más recientes utilizando las teclas de navegación Anterior y Siguiente. Pulse Enter o un sensor de cursor para abrir un libro de la lista.

3.4. Cerrar un archivo

Para cerrar un archivo abierto en el Editor, pulse Espacio + E. También puede abrir el menú de contexto con Espacio + M y, a continuación, desplazarse hasta el menú Archivo y activarlo. Seleccione la opción Cerrar archivo.

Si hay cambios en el archivo que no se han guardado, se le preguntará si desea guardar los cambios antes de cerrar.

3.5. Guardar un archivo de texto

Hay dos tipos de guardado en el Editor: Guardar y Guardar como.

Guardar: Pulse Espacio + S para guardar su archivo con un nombre de archivo ya existente.

Guardar como: Pulse Retroceso + S para guardar una copia de su archivo con un nuevo nombre y cambiar la ubicación.

Si su archivo no se ha guardado nunca, el Editor le pedirá que introduzca un nuevo nombre para el archivo, independientemente del método de guardado que elija.

3.6. Desplazamiento automático por el texto en el Editor

La aplicación Editor cuenta con una función que desplaza automáticamente el texto por la línea braille.

Para iniciar el desplazamiento automático, pulse Enter + Puntos 1-2-4-5-6.

Para detener el desplazamiento automático, pulse cualquier tecla.

3.6.1. Modificar la velocidad de desplazamiento automático

Puede cambiar la velocidad de desplazamiento automático mientras se esté desplazando automáticamente dentro de un archivo.

Para ralentizar el desplazamiento automático, pulse Enter + Punto 3.

Para acelerar el desplazamiento automático, pulse Enter + Punto 6.

3.7. Buscar texto en un archivo

Para buscar un texto en el archivo, pulse Espacio + F. Introduzca el término de búsqueda en el campo en blanco. El cursor se colocará en la primera ubicación donde encuentre el texto.

Pulse Espacio + N para encontrar nuevas coincidencias con la palabra buscada.

Pulse Espacio + P para encontrar coincidencias anteriores con la palabra buscada.

3.7.1. Buscar y reemplazar texto

Para buscar y reemplazar un texto:

1. Pulse Retroceso + F.
2. Introduzca el texto a buscar en el primer cuadro de edición.
3. Introduzca el texto por el que se va a sustituir en el segundo cuadro de edición.
4. Pulse el botón Siguiente para buscar el siguiente resultado de la palabra.
5. Pulse el botón Siguiente para buscar Reemplazar todo.

3.8. Cortar, copiar y pegar texto

El Editor le permite cortar, copiar y pegar texto de forma similar a los programas de ordenador.

Para seleccionar el texto, sitúe el cursor en el primer carácter utilizando un sensor de cursor y, a continuación, pulse Enter + S.

También puede seleccionar el texto desde el Menú de Contexto:

1. Abra el Menú de Contexto con Espacio + M.
2. Desplácese hacia abajo hasta Editar.
3. Pulse Enter o un sensor de cursor.
4. Desplácese hacia abajo hasta Seleccionar texto.
5. Pulse Enter o un sensor de cursor.

Esto marca el inicio de su selección. Ahora sitúese en el final de su selección y pulse Enter + S para marcar el final de su selección.

Para seleccionar todo el texto del archivo, pulse Enter + Puntos 1-2-3-4-5-6.

Para copiar el texto seleccionado, pulse Retroceso + Y.

Para cortar el texto seleccionado, pulse Retroceso + X.

Para pegar el texto copiado o cortado, posicione su cursor donde quiera pegar el texto, utilizando un sensor de cursor y pulse Retroceso + V.

Como siempre, se puede acceder a estos comandos a través del Menú de Contexto.

3.9. Uso del modo de lectura

El modo de lectura le permite leer archivos sin la posibilidad de editar el contenido por error. No se pueden editar archivos mientras se está en el modo de lectura.

Para activar o desactivar el modo de lectura, pulse Espacio + X.

Para activar o desactivar el modo de lectura desde el Menú de Contexto:

1. Pulse Espacio + M para activar el Menú de Contexto.
2. Desplácese hasta el archivo con las teclas de navegación Anterior y Siguiente.
3. Pulse Enter o un sensor de cursor.
4. Desplácese hasta Modo de lectura con las teclas de navegación Anterior y Siguiente.
5. Pulse Enter o un sensor de cursor.

3.10. Insertar fecha y hora

Al crear un archivo en la aplicación Editor, tiene la opción de insertar la fecha y la hora actuales en el archivo.

Para insertar la fecha y la hora:

1. Pulse Espacio + M para activar el Menú de Contexto.
2. Desplácese hasta Editar con las teclas de navegación Anterior y Siguiente.
3. Pulse Enter o un sensor de cursor.
4. Desplácese hasta Insertar utilizando las teclas de navegación Anterior y Siguiente.
5. Pulse Enter o un sensor de cursor.
6. Desplácese hasta Insertar fecha o Insertar hora con las teclas de navegación Anterior y Siguiente.
7. Pulse Enter o un sensor de cursor.

3.11. Añadir, navegar y eliminar marcadores

Los marcadores son una forma útil de conservar su ubicación dentro de un archivo y le permiten volver rápidamente a esa posición en un momento posterior. Para abrir el menú Marcador, presione Enter + M. También puede presionar Espacio + M para abrir el menú contextual y seleccionar el menú Marcador.

3.11.1. Insertar un marcador

Para agregar un marcador en un archivo:

1. Pulse Enter + M para abrir el menú Marcador.
2. Seleccione Insertar marcador usando las teclas de navegación Anterior y Siguiente.
3. Pulse Enter o un sensor de cursor.
4. Introduzca un número de marcador específico no utilizado.

Nota: Si no introduce ningún número, Brailiant seleccionará el primer número disponible y lo asignará al marcador.

5. Pulse Enter. Alternativamente, puede insertar un marcador pulsando Enter + B. Tenga en cuenta que se pueden insertar un máximo de 98 marcadores en un documento.

3.11.2. Navegar por los marcadores

Para saltar a un marcador, presione Enter + J. Se le pedirá que introduzca el número del marcador. Ingrese el número de marcador al que desea navegar, luego pulse Enter.

3.11.3. Eliminar marcadores

Para eliminar un marcador guardado:

1. Pulse Enter + M para abrir el menú Marcador.
2. Desplácese hasta Eliminar marcador con las teclas de navegación Anterior y Siguiente.
3. Pulse Enter o un sensor de cursor.
4. Ingrese el número de marcador que desea eliminar.
5. Pulse Enter.

Nota: Si desea eliminar todos los marcadores del documento, escriba 99 cuando se le solicite el número de marcador.

3.12. Activar/desactivar indicadores de texto

Los indicadores de texto son una herramienta útil para ayudarle a localizar su posición cuando trabaja en un documento con el Editor. Al activar los indicadores de texto, aparecerán corchetes en la línea braille para indicar el comienzo y el final del texto.

Para activar los indicadores de texto:

1. Pulse Espacio + M para activar el menú contextual.
2. Utilice las teclas de navegación Anterior o Siguiente hasta llegar al Menú Archivo y pulse Enter.
3. Utilice las teclas de navegación Anterior o Siguiente hasta que lea configuración del editor y pulse Enter.
4. Utilice las teclas de navegación Anterior o Siguiente hasta llegar a mostrar los indicadores del editor de texto.
5. Pulse Enter para desactivar los indicadores de texto; vuelva a pulsar Enter para activarlos.

Tenga en cuenta que la desactivación de los indicadores de texto sólo se aplicará al editor; todos los demás campos de edición seguirán incluyendo indicadores de texto.

3.13. Tabla de comandos del Editor

Los comandos del Editor se relacionan en la Tabla 2.

Tabla 2: Comandos del Editor

Acción	Atajo o combinación de teclas
Activar modo de edición	Enter o un sensor de cursor
Salir del modo de edición	Espacio + E
Crear archivo	Retroceso + N
Abrir archivo	Retroceso+ O
Guardar	Espacio + S
Guardar como	Retroceso + S
Buscar	Espacio + F
Buscar siguiente	Espacio + N
Buscar anterior	Espacio + P
Reemplazar	Retroceso + F
Inicio/fin de selección	Enter + S
Seleccionar todo	Enter + Puntos 1-2-3-4-5-6
Copiar	Retroceso + Y
Cortar	Retroceso + X
Pegar	Retroceso + V
Borrar palabra anterior	Retroceso + Punto 2
Borrar palabra actual	Retroceso + Puntos 2-5
Borrar carácter anterior	Retroceso
Pasar al siguiente cuadro de edición mientras se edita	Enter

Acción	Atajo o combinación de teclas
Pasar al siguiente cuadro de edición sin editar	Tecla de navegación Siguiente
Pasar al cuadro de edición anterior sin editar	Tecla de navegación Anterior
Mover el cursor al inicio del campo de texto del documento	Espacio + Puntos 1-2-3
Mover el cursor al final del campo de texto del documento	Espacio + Puntos 4-5-6
Iniciar auto desplazamiento	Enter + Puntos 1-2-4-5-6
Incrementar la velocidad de auto desplazamiento	Enter + Punto 6
Ralentizar la velocidad de auto desplazamiento	Enter + Punto 3
Leer todo (síntesis de voz)	Espacio + G
Detener lectura (síntesis de voz)	Retroceso + Enter
Cambiar el modo de lectura	Espacio + X
Menú de marcadores	Enter + M
Ir a marcador	Enter + J
Insertar marcador	Enter + B

4. Uso de la aplicación KeyBrf

KeyBrf es una aplicación similar a KeyPad, pero diseñada explícitamente para editar, abrir y crear documentos braille en formato .brf y .brl. Los archivos se crean, modifican y guardan como .brf.

Para abrir KeyBrf, pulse la tecla de navegación Siguiente hasta llegar al elemento Editor Braille: KeyBrf o pulse "E" en el menú principal, luego pulse Enter o un sensor de cursor.

KeyBrf contiene el mismo menú del Editor Braille, que incluye Crear archivo, Abrir archivo, Guardado recientemente, Configuración del Editor Braille y Cerrar.

Tenga en cuenta que la síntesis de voz no funcionará con la aplicación de Editor braille.

4.1. Crear archivo

Hay varias formas de crear un archivo, dependiendo de su ubicación en el dispositivo.

- Si se encuentra en el menú del Editor Braille, seleccione Crear archivo y pulse Enter o un sensor de cursor.
- En el menú contextual, seleccione y active el menú Archivo y, a continuación, seleccione Crear archivo.

- Alternativamente, pulse Retroceso + B desde cualquier lugar del dispositivo para crear rápidamente un nuevo archivo .brf.

El cursor aparecerá entre dos paréntesis braille, y, en la configuración de usuario, puede configurarse para que parpadee. Puede empezar a escribir en su nuevo archivo.

4.2. Abrir archivo

Si está en el menú del Editor Braille, seleccione Abrir archivo y pulse Enter o un sensor de cursor. Alternativamente, puede pulsar Retroceso + O y, a continuación, seleccionar el archivo que desea abrir utilizando las teclas de navegación Anterior y Siguiente.

4.3. Guardado recientemente

Puede abrir una lista de los diez últimos documentos que haya guardado previamente para acceder rápidamente a ellos.

Para abrir una lista de los diez archivos más recientes, seleccione la aplicación KeyBrf en el menú principal. Utilice las teclas de navegación Anterior o Siguiente hasta llegar a los archivos guardados recientemente y pulse Enter.

Puede desplazarse por los diez archivos más recientes utilizando las teclas de navegación Anterior y Siguiente. Pulse Enter o un sensor de cursor para abrir un libro de la lista.

4.4. Cerrar archivo

Para cerrar un archivo abierto en el Editor Braille, pulse la barra espaciadora + E. También puede abrir el menú contextual con la barra espaciadora + M y, a continuación, desplazarse hasta el menú Archivo y activarlo. Seleccione Cerrar.

Si hay cambios en el archivo que no se han guardado, se le preguntará si desea guardar los cambios antes de cerrar.

4.5. Guardar archivo braille

Hay dos formas de guardado en KeyBrf: Guardar y Guardar como.

Guardar: Pulse Espacio + S para guardar su archivo con un nombre de archivo ya existente.

Guardar como: Pulse Retroceso + S para guardar una copia de su archivo con un nuevo nombre y para cambiar la ubicación del archivo.

Si su archivo nunca ha sido guardado, KeyBrf le pedirá que introduzca un nuevo nombre de archivo independientemente del método de guardado que elija.

4.6. Exportar un archivo braille a texto

Los archivos .brf abiertos en la aplicación Editor Braille pueden exportarse como archivos de texto. Esto puede ser útil si desea abrirlos en la aplicación Editor y trabajar con ellos en otro formato.

Para exportar un archivo braille a texto:

1. Pulse Espacio + M para abrir el menú contextual.
2. Utilice las teclas de navegación Anterior y Siguiente para seleccionar la opción Exportar como texto y pulse Enter.
3. El Brailiant mostrará una lista de tablas braille para exportar. Utilice las teclas de navegación Anterior y Siguiente para seleccionar la tabla braille que desee y pulse Enter.
4. Se le pedirá que introduzca un nombre para el archivo exportado. Escriba el nombre deseado y pulse Enter.
5. Se le mostrará la lista de carpetas de KeyFiles en las que puede guardar el archivo recién creado. Seleccione la carpeta de su elección utilizando las teclas de navegación Anterior y Siguiente y pulse Enter.

4.7. Utilizar auto desplazamiento en KeyBrf

La aplicación KeyBrf incluye una función de auto desplazamiento que desplaza automáticamente el texto escrito en la línea braille.

Para iniciar el Auto desplazamiento, pulse Enter + Puntos 1-2-4-5-6.

Para detener el desplazamiento automático, pulse cualquier tecla.

4.7.1. Modificación de la velocidad de desplazamiento automático

Puede modificar la velocidad de Auto desplazamiento cuando se desplaza automáticamente dentro de un archivo.

Para ralentizar el desplazamiento automático, pulse Enter + Punto 3.

Para acelerar el desplazamiento automático, pulse Enter + Punto 6.

4.8. Buscar texto en un archivo

Para buscar texto en un archivo, pulse Espacio + F. Introduzca el término de búsqueda en el campo en blanco. El cursor se situará en el primer resultado.

Pulse Espacio + N para ir al resultado de búsqueda siguiente.

Pulse Espacio + P para ir al resultado de búsqueda anterior.

4.8.1. Buscar y reemplazar texto

Para buscar y reemplazar texto:

1. Pulse Retroceso + F.
2. Introduzca el texto a buscar en el primer cuadro de edición, llamado Buscar.
3. Introduzca el texto de sustitución en el segundo cuadro de edición, llamado Reemplazar.
4. Seleccione Reemplazar todo para reemplazar todo el texto encontrado con el texto que figura en el campo Reemplazar.
5. Seleccione Siguiente para buscar y reemplazar la siguiente palabra.
6. Seleccione Anterior para encontrar y reemplazar la palabra anterior.

4.9. Cortar, copiar y pegar texto

KeyBrf permite cortar, copiar y pegar texto de forma similar a los editores de ordenador. Para seleccionar el texto, sitúe el cursor en el primer carácter mediante un sensor de cursor y, a continuación, pulse Enter + S.

También puede seleccionar el texto desde el menú contextual:

1. Abra el menú contextual con Espacio + M.
2. Desplácese hasta Editar.
3. Pulse Enter o un sensor de cursor.
4. Desplácese hasta Seleccionar texto.
5. Pulse Enter o un sensor de cursor.

Esto marca el inicio de su selección. Ahora vaya al final del texto que desee seleccionar y pulse Espacio + S para terminar la selección.

Para seleccionar todo el texto incluido en el archivo, pulse Enter + Puntos 1-2-3-4-5-6.

Para copiar el texto seleccionado, pulse Retroceso + Y.

Para cortar el texto seleccionado, pulse Retroceso + X.

Para pegar el texto copiado o cortado, sitúe el cursor en el lugar en el que desea pegar el texto utilizando un sensor de cursor y pulse Retroceso + V.

Como siempre, se puede acceder a estos comandos a través del menú contextual.

El atajo de teclado Retroceso + Y también puede utilizarse para copiar el último resultado de la aplicación KeyCalc y el párrafo actual en la aplicación Victor Reader.

4.10. Uso del modo de lectura

El modo de lectura le permite leer archivos sin la posibilidad de editar el contenido por error. No se pueden editar archivos mientras se está en el modo de lectura.

Para activar o desactivar el modo Lectura, pulse Espacio + X.

Para activar o desactivar el modo Lectura desde el menú contextual:

1. Pulse Espacio + M para activar el menú contextual.
2. Desplácese hasta Archivo con las teclas de navegación Anterior y Siguiente.
3. Pulse Enter o un sensor de cursor.
4. Desplácese hasta el modo Lectura con las teclas de flecha Anterior y Siguiente.

4.11. Añadir, navegar y eliminar marcadores

Los marcadores son una forma útil de mantener su ubicación dentro de un archivo y le permiten volver rápidamente a esa posición en un momento posterior.

Para abrir el menú de marcadores, pulse Enter + M. También puede pulsar Espacio + M para abrir el menú contextual y seleccionar el menú de marcadores.

4.11.1. Insertar marcador

Para añadir un marcador en un archivo:

1. Pulse Enter + M para abrir el menú de marcadores.
2. Seleccione Insertar marcador con las teclas de navegación anterior y siguiente.
3. Pulse Enter o un sensor de cursor.

4. Introduzca un número específico de marcador no utilizado.

Nota: Si no introduce un número, el Brailiant selecciona el primer número disponible y lo asigna al marcador.

5. Pulse Enter.

También puede insertar un marcador pulsando Enter + B. Tenga en cuenta que se pueden insertar un máximo de 98 marcadores en un documento.

4.11.2. Navegar por marcadores

Para saltar a un marcador, pulse Enter + J. Se le pedirá que introduzca el número de marcador. Introduzca el número de marcador al que desea saltar y, a continuación, pulse Enter.

4.11.3. Eliminar marcadores

Para eliminar un marcador guardado:

1. Pulse Enter + M para abrir el menú de marcadores.
2. Desplácese hasta Eliminar marcador con las teclas de navegación Anterior y Siguiente.
3. Pulse Enter o un sensor de cursor.
4. Introduzca el número de marcador que desea eliminar.
5. Pulse Enter.

Nota: Si desea eliminar todos los marcadores del documento, escriba 99 cuando se le pida el Número de marcador.

4.12. Activar/desactivar indicadores de texto

Los indicadores de texto son una herramienta útil para ayudarle a localizar su posición cuando trabaje en un documento con el del Editor Braille. Al activar los indicadores de texto, aparecerán corchetes en la línea braille para indicar el comienzo y el final del texto.

Para activar los indicadores de texto:

1. Pulse Espacio + M para activar el menú contextual.
2. Utilice las teclas de navegación Anterior y Siguiente hasta llegar al menú de archivos y pulse Enter.
3. Utilice las teclas de navegación Anterior y Siguiente hasta llegar a la configuración del editor y pulse Enter.
4. Utilice las teclas de navegación Anterior y Siguiente hasta llegar a mostrar el indicador de editor de texto.
5. Pulse Enter para desactivar los indicadores de texto; vuelva a pulsar Enter para activarlos.

Tenga en cuenta que la activación de los indicadores de texto sólo se aplicará al editor Braille, todos los demás campos de edición seguirán incluyendo indicadores de texto.

4.13. Tabla de comandos de KeyBrf

Los comandos del Editor Braille se relacionan en la tabla 3.

Tabla 3: comandos de KeyBrf

Acción	Atajo o combinación de teclas
Activar modo de edición	Enter o un sensor de cursor
Salir del modo de edición	Espacio + E
Crear archivo braille	Retroceso + B
Abrir archivo braille	Retroceso+ O
Guardar	Espacio + S
Guardar como	Retroceso + S
Buscar	Espacio + F
Buscar siguiente	Espacio + N
Buscar anterior	Espacio + P
Reemplazar	Retroceso + F
Inicio/fin de selección	Enter + S
Seleccionar todo	Enter + Puntos 1-2-3-4-5-6
Copiar	Retroceso + Y
Cortar	Retroceso + X
Pegar	Retroceso + V
Borrar palabra anterior	Retroceso + Punto 2
Borrar palabra actual	Retroceso + Puntos 2-5
Borrar carácter anterior	Retroceso
Pasar al siguiente cuadro de edición mientras se edita	Enter
Pasar al siguiente cuadro de edición sin editar	Tecla de navegación siguiente
Pasar al cuadro de edición anterior sin editar	Tecla de navegación anterior
Mover el cursor al inicio del campo de texto del documento	Espacio + Puntos 1-2-3
Mover el cursor al final del campo de texto del documento	Espacio + Puntos 4-5-6
Iniciar auto desplazamiento	Enter + Puntos 1-2-4-5-6
Incrementar la velocidad de auto desplazamiento	Enter + Punto 6
Ralentizar la velocidad de auto desplazamiento	Enter + Punto 3
Alternar el modo de lectura	Espacio+ X
Menú de marcadores	Enter + M

Saltar a un marcador	Enter + J
Insertar marcador	Enter + B

5. Uso del Lector de Libros

El Lector de Libros es la aplicación que se utiliza para leer o escuchar libros en el Brailiant. Soporta los siguientes formatos de archivo:

- .brf
- .pef
- .txt
- .html
- .docx
- DAISY 2
- DAISY 2.02
- Niso
- .rtf
- .ban
- .bra
- .pdf
- .FB2

Para abrir la app Lector de Libros, pulse la tecla de Navegación Siguiete hasta llegar a Lector de Libros, o pulse 'L' en el Menú Principal. Pulse Enter o un sensor de cursor para acceder a la aplicación.

El menú del Lector de Libros incluye Lista de libros, Leído recientemente, Buscar y Cerrar aplicación.

5.1. Navegar por la Lista de libros

En el Lector de Libros, sus libros se almacenan en una lista de Libros, como si fuera un directorio que contiene todos los medios disponibles en su dispositivo en orden alfabético.

Utilice las teclas de Navegación Anterior y Siguiete para seleccionar un libro de la Lista de libros y, a continuación, pulse Enter o un sensor de cursor.

Tenga en cuenta que el Brailiant puede mostrar un mensaje de error si se abre un libro con formato PDF. Esto ocurre generalmente cuando el archivo contiene imágenes en lugar de texto.

Para cerrar un libro y volver a la Lista de libros, pulse Espacio + E o Espacio + B.

5.1.1. Búsqueda de libros

Para buscar un libro específico en el dispositivo:

1. Seleccione Buscar en el menú del Lector de Libros o pulse Espacio + F.
2. Escriba el texto/nombre del libro.
3. Pulse Enter.

Se le presentará una lista de libros coincidentes con sus criterios de búsqueda.

4. Use las teclas de Navegación Anterior y Siguiente para desplazarse hasta el libro.
5. Pulse Enter o un sensor de cursor para abrirlo.

5.1.2. Acceso a los libros abiertos recientemente

Puede obtener una lista con los últimos cinco libros abiertos para acceder a ellos rápidamente.

Para acceder a la lista de los cinco libros más recientes, pulse Enter + R o seleccione Leídos recientemente en el menú del Lector de Libros.

Puede desplazarse por los cinco libros más recientes con las teclas de Navegación Anterior y Siguiente. Pulse Enter o un sensor de cursor para abrir un libro de la lista.

5.1.3. Gestión de los libros

Al navegar por la lista de libros, puede eliminar un libro seleccionado en la aplicación Biblioteca o moverlo o copiarlo a un dispositivo de almacenamiento externo. Las acciones disponibles para cada libro dependen del tipo y la ubicación del libro. El Menú de Contexto le indicará qué acciones están disponibles.

Las reglas básicas son:

- Se pueden borrar los libros ubicados en la tarjeta SD.
- Los libros descargados de los Servicios en Línea se pueden mover o borrar.
- Los libros sólo se pueden copiar o mover hasta/desde la unidad de almacenamiento externo cuando ésta esté conectada.
- No se pueden copiar o mover libros desde el almacenamiento interno.

Para copiar, mover o borrar un libro:

1. Acceda a la lista de libros con Espacio + B.
2. Seleccione un libro con las teclas de Navegación Anterior y Siguiente.

3. Pulse Retroceso + M para abrir el menú del Gestor de Libros.
4. Seleccione Copiar a, Mover a o Borrar.

5.2. Navegación y acceso a información adicional de los libros

La forma más fácil de navegar dentro de un libro es usando las teclas de Desplazamiento. Utilice las teclas de Desplazamiento Izquierda y Derecha para desplazar el texto hacia la izquierda y hacia la derecha.

5.2.1. Cambiar el nivel de navegación de los libros

El Lector de Libros incluye diferentes niveles de navegación para facilitar la navegación a través de los libros. Los niveles de navegación dependen de cada libro y pueden variar de un libro a otro.

Para cambiar el nivel de navegación:

1. Pulse Espacio + T.
2. Desplácese por los niveles de navegación disponibles utilizando las teclas de Navegación Anterior y Siguiente.
3. Pulse Enter o un sensor de cursor para seleccionar el nivel de navegación.

Una vez seleccionado el nivel de navegación, utilice las teclas de Navegación Anterior y Siguiente para desplazarse con este nivel de navegación.

Por ejemplo, si selecciona el nivel de navegación "Frase", al pulsar la tecla de Navegación Siguiente se desplazará a la siguiente frase en el libro.

5.2.2. Navegación por página, título, porcentaje marcadores en un libro de texto

Para ir a una página, título, porcentaje del libro o marcador:

1. Pulse Enter + G.
2. Desplácese por las opciones de navegación con las teclas de Navegación Anterior y Siguiente.
3. Elija entre página, título, porcentaje o marcador.
4. Pulse Enter o un sensor de cursor.
5. Introduzca un valor.
6. Pulse Enter.

5.2.3. Auto desplazamiento por el texto de los libros de la aplicación Biblioteca

La función de desplazamiento automático de la Brailiant BI 40X le permite desplazarse automáticamente por el texto del libro que está abierto.

Para activar el desplazamiento automático, pulse Enter + Puntos 1-2-4-5-6 cuando esté dentro de un libro. Pulse cualquier tecla para detener el desplazamiento automático y volver al modo de desplazamiento normal.

Puede modificar la velocidad de auto desplazamiento cuando se desplaza automáticamente por un libro.

Para ralentizar el desplazamiento automático, pulse Enter + Punto 3.

Para acelerar el desplazamiento automático, pulse Enter + Punto 6.

5.2.4. Buscar la posición actual en un libro

Utilice el comando Dónde estoy siempre que necesite conocer su posición actual en un libro.

Para activar el comando Dónde estoy, pulse Espacio + Puntos 1-5-6.

También puede acceder al Menú de Contexto pulsando Espacio + M. Desplácese a Dónde estoy con las teclas de Navegación Anterior y Siguiente y, a continuación, pulse Enter o un sensor de cursor para activar el elemento.

Utilice las teclas de Navegación Anterior y Siguiente para desplazarse por los elementos disponibles (Título, Porcentaje, Página y Línea). Utilice las teclas de Desplazamiento Izquierda y Derecha para desplazar el texto a la izquierda y a la derecha.

5.2.5. Ir al principio o al final de un libro

Puede ir al principio o al final de un libro utilizando combinaciones de teclas.

Para ir al principio de un libro, pulse Espacio + Puntos 1-2-3.

Para ir al final de un libro, pulse Espacio + Puntos 4-5-6.

5.2.6. Buscar texto en un libro de texto

Otra forma de navegar por un libro es buscar una cadena de texto específica.

Para buscar un texto, pulse Espacio + F. Se le pedirá que introduzca el texto. Escriba el texto y pulse Enter.

5.2.7. Acceso a la información adicional de un libro

Puede ver la información adicional sobre el libro que está leyendo en el dispositivo (título, autor, descripción, fecha, idioma, tema, editorial y marcadores).

Para ver la información adicional sobre el libro, pulse Espacio + I.

También puede pulsar Espacio + M para abrir el Menú de Contexto. Utilice las teclas de Navegación Anterior y Siguiente para seleccionar la opción Información del libro y, a continuación, pulse Enter o un sensor de cursor para activarla.

Utilice las teclas de Navegación Anterior y Siguiente para desplazarse por la información del libro. Utilice las teclas de Desplazamiento Izquierda y Derecha para desplazar el texto a la izquierda y a la derecha.

5.3. Añadir, navegar, resaltar y eliminar marcadores

Los marcadores son una forma útil de guardar su posición en el libro y le permiten volver rápidamente a ese punto en un momento posterior, ya sea la posición física en un libro de texto o el tiempo en un audiolibro.

Para abrir el menú Marcador, pulse Enter + M. También puede pulsar Espacio + M para abrir el Menú de Contexto y seleccionar Marcador.

5.3.1. Insertar un marcador

Para añadir un marcador en el libro:

1. Pulse Enter + M para abrir el menú Marcador.
2. Seleccione Insertar marcador con las teclas de Navegación Anterior y Siguiente.
3. Pulse Enter o un sensor de cursor.
4. Introduzca un número de marcador no utilizado.
Nota: Si no se introduce un número, el Brailiant seleccionará el primer número disponible y lo asignará al marcador.
5. Pulse Enter.

También puede insertar un marcador rápido pulsando Enter + B.

5.3.2. Navegación por marcadores

Para ir a un marcador, pulse Enter + J. Se le pedirá que introduzca el número del marcador. Introduzca el número de marcador al que desea navegar y, a continuación, pulse Enter.

5.3.3. Resaltar marcadores

La opción Resaltar marcadores se utiliza para definir las posiciones de Inicio y Fin de un texto. El uso de los marcadores resaltados es una buena manera de estudiar fragmentos importantes en un libro de texto.

Para resaltar marcadores:

1. Abra el menú Marcadores pulsando Enter + M.
2. Seleccione Principio de marcador destacado con las teclas de Navegación Anterior y Siguiente.
3. Pulse Enter o un sensor de cursor.
4. Introduzca un número de marcador que no esté asignado.
Nota: Si no introduce un número, el Brailiant seleccionará el primer número disponible y lo asignará al marcador.
5. Pulse Enter.
6. Vaya hasta el punto final del texto resaltado.
7. Abra el menú de Marcadores pulsando Enter + M.

8. Seleccione Final de marcador destacado con las teclas de Navegación Anterior y Siguiente.
9. Pulse Enter o un sensor de cursor.

La posición actual se establece como posición final. Si la posición final se coloca antes de la posición inicial, se intercambiarán.

También puede insertar un marcador rápido. Se utilizará para indicar el final del marcador resaltado.

Para insertar un marcador rápido:

1. Pulse Enter + H para acceder a la lista de marcadores resaltados.
2. Seleccione un número de marcador resaltado.
3. Pulse Enter. Se mostrará el contenido del marcador resaltado actual.
4. Use las teclas de Navegación para desplazarse.
5. Pulse Espacio + E para cerrar el marcador resaltado y volver al contenido del libro.

5.3.4. Eliminar marcadores

Para eliminar un marcador guardado:

1. Pulse Enter + M para abrir el menú de marcadores.
2. Vaya hasta Eliminar marcador con las teclas de Navegación Anterior y Siguiente.
3. Pulse Enter o un sensor de cursor.
4. Introduzca el número de marcador que desea eliminar.
5. Pulse Enter.

Nota: Si desea eliminar todos los marcadores, escriba 99999 cuando se le pida el número de marcador.

5.4. Tablas de comandos del Lector de Libros y de lectura

Los comandos del Lector de Libros y de lectura de libros de texto se enumeran en la Tabla 4.

Tabla 4: Comandos del Lector de Libros/Lectura de libros de texto

Acción	Atajo o combinación de teclas
Lista de libros	Espacio + B
Gestor de libros	Retroceso + M
Ir a opción de Menú	Enter + G
Menú de marcadores	Enter + M

Acción	Atajo o combinación de teclas
Ir a marcador	Enter + J
Insertar marcador rápido	Enter + B
Mostrar marcadores resaltados	Enter + H
Abrir nivel de navegación	Espacio + T
Elemento anterior	Tecla de Navegación Anterior
Siguiente elemento	Tecla de Navegación Siguiente
Ir al nivel de navegación anterior	Retroceso + Punto 3
Ir al nivel de navegación siguiente	Retroceso + Punto 6
Iniciar auto desplazamiento	Enter + Puntos 1-2-4-5-6
Incrementar velocidad de auto desplazamiento	Enter + Punto 6
Ralentizar velocidad de auto desplazamiento	Enter + Punto 3
Leer todo (síntesis de voz)	Espacio + G
Detener lectura (síntesis de voz)	Retroceso + Enter
Dónde estoy	Espacio + Puntos 1-5-6
Información	Espacio + I
Ir al principio del libro	Espacio + Puntos 1-2-3
Ir al final del libro	Espacio + Puntos 4-5-6
Abrir libros recientes	Enter + R
Buscar libros o texto	Espacio + F
Buscar siguiente	Espacio + N
Buscar anterior	Espacio + P
Siguiente línea no en blanco	Enter + Punto 4
Línea no en blanco anterior	Enter + Punto 1
Carácter anterior	Espacio + Punto 3
Siguiente carácter	Espacio + Punto 6
Palabra anterior	Espacio + Punto 2
Siguiente palabra	Espacio + Punto 5
Frase anterior	Espacio + Puntos 2-3
Siguiente frase	Espacio + Puntos 5-6
Iniciar o finalizar la selección	Enter + S
Seleccionar todo (párrafo actual)	Enter + Puntos 1-2-3-4-5-6
Copiar (párrafo actual)	Retroceso + Y

Acción	Atajo o combinación de teclas
Borrar libro	Retroceso + Puntos 2-3-5-6

Los comandos del lector de libros para lectura de audiolibros se muestran en la tabla 5.

Tabla 5: comandos del lector de libros para audiolibros

Acción	Atajo o combinación de teclas
Lista de libros	Espacio + B
Gestor de libros	Retroceso + M
Ir a opción de Menú	Enter + G
Menú de marcadores	Enter + M
Ir a marcador	Enter + J
Insertar marcador rápido	Enter + B
Mostrar marcadores resaltados	Enter + H
Abrir nivel de navegación	Espacio + T
Elemento anterior	Tecla de Navegación Anterior
Siguiente elemento	Tecla de Navegación Siguiente
Ir al nivel de navegación anterior	Retroceso + Punto 3
Ir al nivel de navegación siguiente	Retroceso + Punto 6
Dónde estoy	Espacio + Puntos 1-5-6
Información	Espacio + I
Ir al principio del libro	Espacio + Puntos 1-2-3
Ir al final del libro	Espacio + Puntos 4-5-6
Abrir libros recientes	Enter + R
Borrar libro	Retroceso + Puntos 2-3-5-6
Reproducir audiolibro	Espacio + G
Detener la lectura	Retroceso + Enter
Avance rápido 5 segundos	Tecla de navegación derecha (pulsación corta)
Retroceder 5 segundos	Tecla de navegación izquierda (pulsación corta)
Avance rápido (saltos más largos de tiempo)	Tecla de navegación derecha (pulsación larga)
Retroceder (saltos más largos de tiempo)	Tecla de navegación izquierda (pulsación larga)
Incrementar velocidad de lectura	Enter + Punto 5
Ralentizar velocidad de lectura	Enter + Punto 2

6. Uso del modo Terminal

Una de las principales funcionalidades del Brailiant es el modo Terminal. Cuando se conecta a un dispositivo anfitrión que ejecuta un lector de pantalla, como un ordenador o un dispositivo inteligente, el Modo Terminal mostrará el texto seleccionado en el dispositivo anfitrión.

Es posible la conexión al dispositivo anfitrión a través de la tecnología inalámbrica *Bluetooth*® o mediante el cable USB-C incluido con su Brailiant. Se pueden conectar hasta cinco dispositivos Bluetooth y un USB a la vez.

Tenga en cuenta que si hay un dispositivo conectado al Brailiant a través de USB, puede hacer que el Brailiant inicie la conexión automáticamente.

Vea “solicitar que se abra la conexión USB” en la tabla Opciones de usuario para recorrer las opciones de configuración disponibles.

6.1. Conexión y salida del Modo Terminal

Para conectarse en modo Terminal, asegúrese de tener un dispositivo Windows®, iOS®, Android o Mac® con un lector de pantalla en funcionamiento.

Para activar el Modo Terminal:

1. Pulse Espacio + Puntos 1-2-3-4-5-6 o el botón de Inicio para ir al Menú Principal.
2. Vaya a Terminal pulsando ‘t’ o usando las teclas de Navegación Anterior y Siguiente.
3. Pulse Enter o un sensor de cursor.

Para salir del Modo Terminal y acceder a la lista de dispositivos conectados, pulse una vez el botón de Inicio.

6.1.1. Comprobar la compatibilidad del Brailiant BI 40X

El Brailiant es compatible con los siguiente:

Lectores de pantalla: JAWS® 18+ (versión 18 y posteriores), NVDA, SuperNova, ChromeVox (solo vía USB), Android (solo vía USB) y VoiceOver.

Sistemas operativos: cualquier Windows 8+, Android, macOS® 10.15+ (Catalina), o dispositivo iOS 13.4+.

6.1.2. Despertar su dispositivo iOS usando el Brailiant

Con su dispositivo iOS bloqueado, al pulsar cualquier sensor de cursor del Brailiant se despertará y deberá introducir su código de acceso. Esto le permitirá mantener su dispositivo iOS en un bolso o bolsillo mientras utiliza el Brailiant como unidad de control y salida.

6.1.3. Conexión por USB

(Tenga en cuenta que los pasos de esta sección presuponen que la opción "conectar siempre" no está activada)

Para conectar vía USB:

1. Conecte el Brailiant a un ordenador Windows o Mac con el cable USB-C.
2. Seleccione Dispositivos conectados (primer elemento del Menú Terminal).
3. Pulse Enter.
4. Seleccione Conexión USB.
5. Pulse Enter.
6. Espere a que se establezca la conexión.

Si la conexión es satisfactoria, el contenido de su dispositivo anfitrión se mostrará en la línea braille.

El Brailiant ahora también está disponible como teclado externo para escribir en el dispositivo anfitrión.

6.1.4. Conexión por Bluetooth

Para emparejar un nuevo dispositivo por Bluetooth:

1. Desde el dispositivo anfitrión, active el Bluetooth.
2. En el Brailiant, vaya al Menú Principal.
3. Seleccione Terminal y pulse Enter o un sensor de cursor.
4. En el Menú Terminal, seleccione Añadir dispositivo Bluetooth y pulse Enter.
5. Si el Bluetooth está desactivado, se activará automáticamente. Tenga en cuenta que, una vez activado el modo Bluetooth, su línea pasará a estar en modo descubrible durante 5 minutos.
6. Tenga en cuenta que en cualquier momento puede mantener pulsada la tecla Enter durante 5 segundos para volver a poner el dispositivo en modo descubrible durante 5 minutos.
7. La línea braille le mostrará instrucciones para conectarse al dispositivo anfitrión. Desde el dispositivo anfitrión, inicie el emparejamiento Bluetooth con la Brailiant BI 40X.
8. En la línea braille aparecerá un mensaje: "xx está conectado", donde xx es el nombre del dispositivo anfitrión.
9. El foco se dirigirá a la lista de dispositivos conectados.
10. Utilice las teclas de Navegación Anterior y Siguiente para desplazarse por la lista de dispositivos conectados hasta llegar al dispositivo anfitrión con el que está intentando conectarse. Pulse Enter o un sensor de cursor para activarlo.

Si la conexión es satisfactoria, el contenido del dispositivo anfitrión se mostrará en la línea braille.

6.2. Papelera en modo terminal

Cuando se copia o corta una selección de texto, se almacena en un portapapeles global y se puede pegar en otras ubicaciones del dispositivo. Esta función puede ser útil si, por ejemplo, desea copiar un fragmento de un libro en Victor Reader y pegarlo en un documento en KeyPad.

El portapapeles global también se puede usar cuando se utilizan dispositivos externos emparejados con el Brailiant a través de USB o Bluetooth. Actualmente, JAWS en Windows y VoiceOver son compatibles con el portapapeles del modo terminal. Todos los demás lectores de pantalla pueden tener dificultades para manejar el portapapeles. Cuando utilice el portapapeles del modo Terminal, tenga en cuenta que hay una limitación de 360 caracteres.

Para copiar un elemento a un dispositivo conectado:

1. Pulse Retroceso + Y para copiar el elemento de su elección.
2. En el dispositivo conectado, acceda a la ubicación donde desea pegar el elemento.
3. Pulse el comando Espacio + Enter + Puntos 4-5-6. Aparecerá el mensaje "entrada en modo local". El comando de alternancia de tareas le permite utilizar algunas funciones internas del Brailiant mientras está conectado a un dispositivo externo, como consultar el estado de la batería y la fecha y la hora.
4. Pulse Retroceso + V para pegar el elemento en el dispositivo conectado.

6.3. Alternar entre dispositivos conectados

Si tiene más de un dispositivo conectado al Brailiant, puede cambiar de dispositivo en cualquier momento.

Para cambiar a otro dispositivo conectado pulse el botón de inicio + las teclas de navegación anterior o siguiente para desplazarse por la lista de dispositivos.

Alternativamente, puede cambiar a otro dispositivo haciendo lo siguiente:

1. Pulse el Botón de Inicio para volver a la lista de dispositivos conectados.
2. Seleccione el dispositivo conectado con las teclas de Navegación Anterior y Siguiente.
3. Pulse Enter o un sensor de cursor.

Nota: Cuando se conecta un dispositivo Bluetooth, aparece un símbolo con 8 puntos a continuación del nombre del dispositivo. Si no aparece el símbolo con 8 puntos, pulse sobre el dispositivo para establecer la conexión.

Si tiene problemas con la conexión Bluetooth, puede hacer clic en Reconectar dispositivos. Esto apagará y volverá a encender el Bluetooth y reconectará sus dispositivos. Utilice esta opción sólo si no hay indicación en braille al conectarse a un dispositivo.

6.4. Conexiones USB en modo terminal

(Tenga en cuenta que los pasos de esta sección presuponen que la opción "conectar siempre" no está activada)

Cuando se utiliza el Brailiant en modo terminal, es posible que se le pida una conexión USB o que se inicie automáticamente la conexión al insertar un cable USB desde un dispositivo anfitrión.

Para activar la función Solicitar que se abra la conexión USB:

1. Vaya al menú principal.
2. Seleccione Opciones y pulse Enter.
3. Seleccione Ajustes de Usuario y pulse Enter.
4. Utilice las teclas de navegación Anterior y Siguiente hasta llegar al elemento Solicitar que se abra la conexión USB y, a continuación, pulse Enter.
5. Utilice las teclas de navegación Anterior y Siguiente hasta llegar a la opción deseada y pulse Enter.

6.5. Desactivar el teclado Perkins en modo terminal

Cuando se utiliza el Brailiant en modo terminal, es posible desactivar el teclado Perkins para simplificar el uso del dispositivo.

Para desactivar el teclado en modo terminal:

1. Vaya al menú principal.
2. Seleccione Opciones y pulse Enter.
3. Seleccione Configuración de usuario y pulse Enter.
4. Utilice las teclas de navegación Anterior y Siguiente hasta llegar al elemento Deshabilitar Teclado en Modo Terminal.
5. Pulse Enter para desactivar el teclado en modo terminal; vuelva a pulsar Enter para activarlo.

Tenga en cuenta que las teclas de navegación y las teclas de comando seguirán funcionando cuando el teclado esté desactivado.

7. Uso del Gestor de Archivos

El Gestor de Archivos le permite navegar, borrar, copiar y realizar todas las operaciones de archivo que esperarías de un gestor de archivos para PC.

Para abrir el Gestor de Archivos, pulse la tecla de Navegación Siguiendo hasta llegar a Gestor de Archivos.

También puede abrir el Gestor de Archivos pulsando G en el Menú Principal y, a continuación, pulse Enter o un sensor de cursor.

7.1. Búsqueda de archivos

Puede navegar a través de sus archivos y carpetas con las teclas de Navegación Anterior y Siguiendo. Los nombres de las carpetas tienen un símbolo de 8 puntos delante del nombre de la carpeta. Pulse Enter sobre una carpeta para abrirla.

Pulse Espacio + E para volver a la carpeta principal. También puede ir hasta la opción Atrás y, a continuación, pulsar Enter o un sensor de cursor.

7.1.1. Selección de una unidad en el Gestor de Archivos

Antes de usar el Gestor de Archivos, primero tiene que elegir la unidad a la que desea acceder: la memoria interna, una tarjeta SD o una memoria USB.

Para seleccionar una unidad, pulse Espacio + D y obtendrá una lista de las unidades disponibles. Desplácese por la lista con las teclas de Navegación Anterior o Siguiendo y pulse Enter o un sensor de cursor para confirmar su elección.

Ahora se encuentra en la raíz de la unidad seleccionada.

Pulse Espacio + D en cualquier punto para volver a la pantalla de selección de unidad.

7.1.2. Acceso a la información de archivos y carpetas

Para obtener información adicional de un archivo o una carpeta, selecciónelo con las teclas de Navegación Anterior o Siguiendo y, a continuación, pulse Espacio + I.

Ahora puede desplazarse por una lista con información del archivo o la carpeta con las teclas de Navegación Anterior y Siguiendo. Utilice las teclas de Desplazamiento Izquierda y Derecha para desplazar el texto a la izquierda y a la derecha.

7.1.3. Mostrar la ruta del archivo actual

La función Dónde estoy le permite visualizar en la línea de su Brailiant la ruta de su ubicación actual.

Para visualizar la ruta del archivo actual, pulse Espacio + Puntos 1-5-6.

7.1.4. Buscar archivos y carpetas

Puede acceder rápidamente a un determinado archivo o carpeta mediante una búsqueda con el Gestor de Archivos.

Para iniciar la búsqueda de un archivo o carpeta en el Gestor de Archivos:

1. Pulse Espacio + F.
2. Escriba el nombre del archivo o carpeta.
3. Pulse Enter.

Se mostrará en la línea braille una lista de archivos y carpetas relacionados con los resultados de la búsqueda.

4. Pulse Espacio + E para cerrar el resultado de la búsqueda.

7.1.5. Ordenar archivos o carpetas

Por defecto, los nombres de los archivos y las carpetas están ordenados alfabéticamente. Sin embargo, se pueden ordenar los archivos y las carpetas utilizando diferentes parámetros.

Para cambiar los parámetros de ordenación de los archivos y las carpetas:

1. Pulse Espacio + V.

El Brailiant le mostrará una lista de las opciones de ordenación disponibles: Nombre, Tamaño, Fecha y Tipo.

2. Desplácese por la lista con las teclas de Navegación Anterior o Siguiente.
3. Pulse Enter o un sensor de cursor para activar la opción de ordenación que haya elegido.

Si se selecciona nuevamente el mismo parámetro de ordenación, la información pasa de ser ascendente a descendente, y lo contrario si lo vuelve a seleccionar una vez más.

7.2. Editar archivos y carpetas

El Gestor de Archivos del Brailiant le permite trabajar con archivos de forma similar a un ordenador o una tableta.

7.2.1. Crear una nueva carpeta

El Gestor de Archivos le ofrece la posibilidad de crear nuevas carpetas.

La forma más sencilla de hacerlo es pulsar Espacio + N e introducir el nombre de la nueva carpeta en el campo en blanco. A continuación, pulse Enter para crearla.

7.2.2. Renombrar archivos o carpetas

Para renombrar un archivo o una carpeta:

1. Seleccione el archivo o carpeta que desea renombrar utilizando las teclas de Navegación Anterior y Siguiente.
2. Pulse Retroceso + R.
3. Introduzca el nombre del nuevo archivo o carpeta.

4. Pulse Enter para renombrar el archivo o la carpeta.

Nota: El nombre del archivo debe ser único en su directorio actual, y solo se puede renombrar un archivo o carpeta a la vez.

7.2.3. Selección de archivos o carpetas para aplicar acciones adicionales

Antes de poder realizar una acción en un archivo o carpeta, como cortar, copiar o pegar, debe seleccionar (o marcar) el archivo o carpeta que desee.

Para marcar un archivo o una carpeta, seleccione el archivo con las teclas de Navegación Anterior o Siguiente y, a continuación, pulse Retroceso + L.

Para desmarcar un archivo o carpeta, selecciónelo y vuelva a pulsar Retroceso + L.

Para marcar todos los archivos y carpetas del directorio actual, pulse Enter + puntos 1-2-3-4-5-6.

7.2.4. Copiar, cortar y pegar archivos o carpetas

Copiar y pegar archivos y carpetas

Para copiar un solo archivo o carpeta, seleccione el archivo con las teclas de Navegación Anterior o Siguiente y, a continuación, pulse Retroceso + Y.

Para cortar un solo archivo o carpeta, seleccione el archivo con las teclas de Navegación Anterior o Siguiente y, a continuación, pulse Retroceso + X.

Para copiar o cortar varios archivos o carpetas:

1. Seleccione el archivo o carpeta a copiar con las teclas de Navegación Anterior o Siguiente.
2. Pulse Retroceso + L para marcar el archivo o carpeta.
3. Repita este paso para marcar todos los archivos o carpetas que desee copiar.
4. Pulse Retroceso + Y para copiar **O** Retroceso + X para cortar.

Los archivos o carpetas ahora están copiados/cortados en el portapapeles y listos para ser pegados.

Pegar archivos y carpetas

Para pegar los archivos o carpetas copiados o cortados, desplácese a la ubicación en la que desea pegar y pulse Retroceso + V.

7.2.5. Borrar archivos o carpetas

Para eliminar un solo archivo o carpeta, seleccione el archivo con las teclas de pulgar Anterior o Siguiente y, a continuación, pulse Retroceso + Puntos 2-3-5-6.

Para eliminar varios archivos o carpetas:

1. Seleccione el archivo o carpeta que desee eliminar con las teclas de Navegación Anterior o Siguiente.

2. Una vez seleccionado, pulse Retroceso + L para marcar el archivo o la carpeta.
3. Repita este paso para marcar todos los archivos o las carpetas que desee eliminar.
4. Cuando esté listo para eliminar los archivos o carpetas marcados, pulse Retroceso + Puntos 2-3-5-6.

Nota: El Brailiant le preguntará si está seguro de que desea eliminar los archivos y/o carpetas sólo cuando se haya configurado la opción Confirmar eliminación en el menú Ajustes. Seleccione "Sí" con las teclas de Navegación Anterior o Siguiente y pulse Enter o un sensor de cursor para confirmar el borrado. Para obtener más información sobre la configuración de Confirmar borrado, vaya a la [Sección de Ajustes Usuario](#).

7.3. Tabla de comandos del Gestor de Archivos

Los comandos del Gestor de Archivos se enumeran en la Tabla 6.

Tabla 6: Comandos del Gestor de Archivos

Acción	Atajo o combinación de teclas
Crear nueva carpeta	Espacio + N
Información del archivo	Espacio + I
Marcar/Desmarcar	Retroceso + L
Marcar todo/Desmarcar todo	Enter + Puntos 1-2-3-4-5-6
Renombrar archivo	Retroceso + R
Borrar archivo	Retroceso + Puntos 2-3-5-6
Copiar archivo	Retroceso + Y
Cortar archivo	Retroceso + X
Pegar archivo	Retroceso + V
Buscar archivo	Espacio + F
Ordenar archivos	Espacio + V
Dónde estoy	Espacio + Puntos 1-5-6
Seleccionar unidad	Espacio + D
Ir a la carpeta principal	Espacio + E
Expulsar medio	Enter + E

8. Uso de la aplicación Calculadora

El Brailiant cuenta con una aplicación de calculadora que permite realizar las operaciones más habituales.

Nota: Actualmente, la Calculadora solo admite el Braille Computerizado.

Para abrir la Calculadora:

1. Vaya al Menú Principal.
2. Pulse C o las teclas de Navegación Anterior o Siguiente hasta llegar al elemento de menú Calculadora.
3. Pulse Enter o un sensor de cursor.

8.1. Funcionamiento de la calculadora

Para utilizar la calculadora, escriba una ecuación completa y pulse Enter para obtener el resultado.

Por ejemplo, escriba la ecuación $20-(6+8)$ (sin espacios). Pulse Enter y el Brailiant le mostrará 6 como respuesta.

Para borrar la ecuación anterior, pulse Espacio + puntos 3-5-6.

Para añadir operadores, tales como + o -, abra el Menú de Contexto con Espacio + M. Consulte la [Sección Tabla de comandos de la Calculadora](#), para obtener una lista completa de los comandos y operadores de la Calculadora.

8.2. Tabla de comandos de la Calculadora

Los comandos de la Calculadora se enumeran en la Tabla 7.

Tabla 7: Comandos de la Calculadora

Acción	Atajo o combinación de teclas
Más	Puntos 2-3-5
Menos	Puntos 3-6
Multiplicación	Puntos 2-5-6
División	Puntos 3-4-7-8
Igual	Enter
Borrar	Espacio + Puntos 3-5-6
Punto decimal	Punto 3
Porcentaje	Puntos 1-5-6
Raíz Cuadrada	Espacio + Puntos 3-4-5
Pi	Espacio + Y

9. Funcionamiento de la aplicación Fecha y Hora

El Brailiant dispone de una aplicación que te da la fecha y la hora actuales.

Para abrir Fecha y Hora:

1. Vaya al Menú Principal.
2. Pulse la tecla de Navegación Anterior o Siguiente hasta llegar al elemento de menú Fecha y Hora.
3. Pulse Enter o un sensor de cursor.

9.1. Visualización de la hora y la fecha

Al abrir la aplicación Fecha y Hora, el Brailiant le mostrará la hora actual.

Desplácese hacia la derecha una vez con la tecla de Dirección Derecha para mostrar la fecha.

Desplácese hacia la izquierda con la tecla de Dirección Izquierda para volver a la hora.

Para ver rápidamente la fecha y la hora desde cualquier punto del Brailiant, pulse Enter + T para la hora y Enter + D para la fecha.

9.2. Ajustar la fecha y la hora

Para cambiar la hora y la fecha, pulse Espacio + M desde la aplicación Fecha y Hora.

Se abrirá un submenú con las siguientes opciones:

Cambiar la hora: Escriba la hora actual entre los corchetes, pulse Enter; repítalo para los minutos.

Cambiar la fecha: Escriba el año actual entre los corchetes y pulse Enter; repítalo para el mes y el día.

Horario de verano: Pulse Enter para activar o desactivar el horario de verano.

Formato de hora: Pulse Enter para cambiar entre el formato de hora de 24 y 12 horas.

Formato de la fecha: Seleccione el formato de fecha preferido (que aparece a continuación) y pulse Enter.

- Idioma por defecto
- Día, Mes
- Día, Mes, Año
- Mes, Día
- Mes, Día, Año
- Año, Mes, Día

10. Menú de Opciones

El menú de Opciones le permite modificar la configuración de su Brailiant, y contiene los siguientes elementos:

- Ajustes de usuario

- Perfil de Idioma
- Wifi
- Bluetooth
- Cambiar idioma
- Activar el modo de examen
- Actualización de Software
- Acerca de

Para abrir el menú de Opciones, en el Menú Principal, pulse la tecla de Navegación Siguiendo hasta llegar al elemento Opciones, o pulse “O”, y, a continuación, pulse Enter o un sensor de cursor. También puede acceder al menú de Ajustes pulsando Espacio + O.

11. Ajustes de usuario

11.1. Tabla de opciones de ajustes de usuario

Las opciones de ajustes de usuario se enumeran en la Tabla 8.

Tabla 8: Operaciones de configuración

Configuración	Opción/Resultado
Modo Avión	Encendido o Apagado; si está Encendido, todas las funciones inalámbricas estarán desactivadas
Marcadores de formato	Encendido o Apagado; si está Apagado, los marcadores de formato estarán ocultos
Cursor visible	Encendido o Apagado
Parpadeo del cursor	Activado o desactivado; si está activado, el cursor parpadea cada 0,5 segundos.
Tiempo de visualización del mensaje	1–30 segundos: tiempo de visualización de mensajes
Hora de dormir	Número de minutos; 0 para desactivar
Cortar palabras	Encendido o Apagado
Comprimir líneas en blanco	Encendido o Apagado; si está Encendido, las líneas en blanco no serán visibles
Confirmar borrado	Encendido o Apagado; si está Encendido, el Brailliant pedirá confirmación de borrado de archivos
Vibración	Encendido o Apagado; si está Encendido, el Brailliant vibrará
Beep	Encendido o Apagado; si está Encendido, el Brailliant emitirá pitidos
Configuración teclas de pulgar	Asigne los comandos Elemento anterior, Elemento siguiente, Desplazamiento a la

Configuración	Opción/Resultado
	izquierda y Desplazamiento a la derecha a las teclas de navegación que elija
Notificaciones inalámbricas	Activar o desactivar la información de la conexión inalámbrica y Bluetooth
Modo de una mano	Activado o desactivado; si está activado, pueden pulsarse los puntos uno a uno, la combinación de puntos no se confirmará hasta que no se pulse la barra espaciadora
Iniciar modo terminal	Activado o desactivado; si está activado, el dispositivo se encenderá mostrando el menú del modo terminal hasta que se reinicie
Solicitar que se abra la conexión USB	Activado o desactivado; si está activado, y solo cuando el dispositivo reconozca una conexión USB, pedirá que se abra la conexión USB en modo terminal
Deshabilitar teclado en modo terminal	Activado o desactivado; si está activado, el teclado se desactivará cuando el dispositivo esté en modo terminal

11.2. Añadir, modificar y borrar perfiles de idioma

El menú de Perfil de idioma mostrará todos los perfiles de idioma disponibles en su Brailiant. El perfil de idioma activo aparecerá subrayado con los puntos 7 y 8 en el dispositivo. Crear múltiples perfiles de idioma le permite cambiar fácilmente entre diferentes tablas braille y voces.

Desplácese por los perfiles de idioma disponibles con las teclas de Navegación Siguiente y Anterior y, a continuación, pulse Enter o un sensor de cursor para seleccionarlo.

11.2.1. Añadir un perfil de idioma

Para añadir un perfil de idioma, seleccione Añadir perfil de idioma, a continuación, pulse Enter o un sensor de cursor.

Se le pedirá que introduzca las siguientes opciones:

Nombre del perfil: Escriba el nombre del perfil entre los corchetes y, a continuación, pulse Enter.

Grado Braille: Elija entre Integral, Estenográfico y Computerizado y, a continuación, pulse Enter. Tenga en cuenta que el Brailiant le permite ocultar el Braille Estenográfico y/o el Braille Computerizado al alternar entre los grados de braille.

Tabla de Braille Computerizado: Seleccione su tabla de Braille Computerizado y, a continuación, pulse Enter. No realice la selección si no desea activar el Braille Computerizado.

Tabla de Braille Integral: Seleccione su tabla de Braille Integral y, a continuación, pulse Enter.

Tabla de Braille Estenográfico: Seleccione su tabla de Braille Estenográfico y, a continuación, pulse Enter. No realice la selección si no desea activar el Braille Estenográfico.

Voz principal: seleccione la voz principal de su elección, a continuación, pulse Enter. Seleccione ninguna para desactivar la voz principal. Las voces disponibles dependerán de la selección de la voz del sistema y la voz adicional que se pueden cambiar en la selección de voz dentro de los ajustes de la voz.

Guardar configuración: Pulse Enter para guardar su configuración.

El nuevo perfil de idioma ahora estará disponible en el menú de configuración del Perfil de idioma.

11.2.2. Modificar o borrar un perfil de idioma

Para modificar o eliminar un perfil de idioma.

1. En el menú opciones, Desplácese hasta el elemento perfil de idioma.
2. Desplácese a través de los perfiles de idioma disponibles con las teclas de Navegación Siguiente y Anterior.
3. Pulse Espacio + M para abrir el menú de Contexto.
4. Seleccione Borrar perfil de idioma o Configurar perfil de idioma y pulse Enter.

Alternativamente, puede seleccionar la opción de configurar perfil de idioma o borrar perfil de idioma en el menú de perfil de idioma.

11.3. Síntesis de voz

El Brailiant permite que el texto que aparece en la línea braille se verbalice mediante una síntesis de voz. De manera predeterminada, la síntesis de voz está activada y funcionará al encender el dispositivo. Tenga en cuenta que la síntesis de voz se adaptará al idioma seleccionado del sistema.

Para activar y desactivar la síntesis de voz:

1. En el menú de opciones seleccione el elemento Ajustes de síntesis de voz y pulse Enter.
2. Utilice las teclas de navegación anterior y siguiente hasta llegar al elemento Síntesis de voz.
3. Pulse Enter para desactivar la síntesis de voz. Pulse nuevamente Enter para activarla.

De forma alternativa, puede pulsar Espacio + tecla de navegación anterior para activar y desactivar la síntesis de voz.

Mientras edita texto en el Editor o lee un documento en Victor Reader puede pulsar Espacio + G para leer el texto desde la posición del cursor. Pulse Retroceso + Enter para detener la lectura.

Nota: en la aplicación Editor braille la síntesis de voz no estará disponible.

11.3.1. Selección de voz

Al navegar por el dispositivo se puede seleccionar la voz que quiere utilizar para leer los menús, mensajes del sistema y contenido. Si desea utilizar una voz diferente para la lectura de los contenidos, puede hacerlo seleccionando la voz secundaria. La voz principal puede cambiarse desde los perfiles de idioma.

Para seleccionar la voz principal y la voz secundaria:

6. En el menú de opciones, seleccione el elemento Ajustes de síntesis de voz y pulse Enter.
7. Utilice las teclas de navegación anterior y siguiente hasta llegar al elemento selección de voz y pulse Enter. Aparecerá un submenú.
8. Seleccione entre voz principal y voz secundaria y pulse enter. Aparecerá una lista con las voces disponibles.
9. Seleccione la voz de su elección y pulse Enter.
10. Cualquier cambio en las voces requerirá reiniciar el dispositivo.

Para obtener información sobre la selección de la voz secundaria, para la lectura del contenido en el Editor y Victor reader, por favor, lea la sección [añadir, configurar y borrar perfiles de idioma](#).

11.3.2. Tabla de ajustes de voz

Los ajustes de voz disponibles se enumeran en la tabla 9.

Tabla 9: Ajustes de voz

Ajuste	Opción/resultado
Voz	Encendida o apagada; si está apagada, todas las características de voz están desactivadas.
Menú hablado	Encendido o apagado; si está apagado, todas las características de voz están desactivadas al desplazarse por los menús, pero continúan activadas en las aplicaciones.
Verbalizar palabra del cursor	Encendido o apagado; si está encendido, el usuario puede pulsar un sensor de cursor y la voz leerá la palabra que esté debajo.

Verbalizar el contenido mostrado al desplazarse	Encendido o apagado; si está encendido, la voz leerá el resto de la línea cuando el usuario la desplace en la línea braille.
Eco de borrado	Encendido o apagado; si está encendido, el dispositivo verbalizará los caracteres que se borren con la tecla de retroceso.
Eco de teclado	Palabras, caracteres, caracteres y palabras o apagado; la opción seleccionada determina lo que se verbalizará al escribir con el teclado.
Selección de voz	Voz principal, voz secundaria.

11.4. Utilizar una red Wi-Fi o Bluetooth

El Brailiant BI 40X es compatible con redes Wi-Fi de 2.4 GHz.

11.4.1. Conexión a una red Wi-Fi

Seleccione Nueva conexión en el menú Wi-Fi y, a continuación, pulse Enter o un sensor de cursor para acceder.

Hay tres opciones de conexión:

Buscar por SSID: Seleccione esta opción para descubrir las redes disponibles en su entorno. Cuando el Brailiant termine de buscar, mostrará una lista de todas las redes que haya encontrado.

Pulse Enter o un sensor de cursor para seleccionar la red. A continuación, introduzca la contraseña y pulse Enter para completar la conexión.

Conexión WPS: Seleccione esta opción para establecer una conexión Wi-Fi mediante WPS. El Brailiant mostrará “cargando...” durante aproximadamente 30 segundos. Pulse el botón WPS en su enrutador de red para activar la detección de nuevos dispositivos. Unos segundos después se conectará automáticamente a la red.

Conexión manual: Seleccione esta opción para introducir manualmente el SSID de su red y la contraseña. Cuando termine, pulse Enter para conectarse.

11.4.2. Tabla de ajustes Wi-Fi

En la tabla 10 se enumeran los ajustes Wi-Fi disponibles.

Tabla 10: Ajustes Wi-Fi

Ajustes	Opción/Resultado
Wi-Fi	Pulse Enter para activar o desactivar el Wi-Fi
Estado	Proporciona información sobre el estado actual del Wi-Fi

Ajustes	Opción/Resultado
Nueva conexión	Pulse Enter para crear una nueva conexión Wi-Fi
Iniciar conexión	Conéctese a una red Wi-Fi conocida por su dispositivo
Borrar conexión	Hacer que el dispositivo se olvide de una red conocida
Ajustes de red	Cambiar la configuración avanzada de la red, como Modo, IP, Máscara de Subred, Puerta de Enlace y DNS
Importar configuración Wi-Fi	Importar la información de una red Wi-Fi desde un archivo

11.5. Elegir las opciones del Modo Bluetooth

Las siguientes opciones del modo Bluetooth están disponibles en el Braille BI 40X.

Modo Bluetooth: Encendido o Apagado

Conectar dispositivo: Conectar el Braille con un dispositivo Bluetooth emparejado

Desconectar dispositivo: Desconectar la conexión Bluetooth activa

Borrar dispositivos emparejados: Hace que su dispositivo se olvide de un dispositivo Bluetooth.

12. Personalizar el Menú Principal

La función de personalización permite quitar elementos del menú principal del Braille, a excepción del elemento Ajustes y del elemento Apagar. Esta función es útil para las personas recién iniciadas que deseen simplificar el uso de su dispositivo.

Para personalizar las opciones del Menú Principal:

1. Vaya al Menú Principal.
2. Seleccione Ajustes.
3. Pulse Enter.
4. Vaya a las aplicaciones del Menú Principal.
5. Pulse Enter.
6. Aparecerá la lista de las aplicaciones del Menú Principal. Vaya a la aplicación que desea quitar del menú y pulse Enter para desactivarla. Si vuelve a pulsar Enter, se volverá a activar.
7. Pulse en Guardar para aplicar los cambios.

13. Modo de una mano

El Brailiant se puede usar en modo de una mano que permite ingresar atajos con una sola mano. Cuando se activa el modo de una mano, cambia la forma en que se realizan los comandos y la entrada en Braille. Cada tecla se puede pulsar y soltar una por una, y la combinación de puntos solo se confirma una vez que se pulsa la barra espaciadora. Para insertar un espacio en blanco entre palabras, pulse la barra espaciadora dos veces.

Para ejecutar comandos en braille, se usa la misma lógica que para la entrada de caracteres. Para los comandos de Braille que implican el uso de la barra espaciadora, como el comando Ir al principio (espacio con puntos 1, 2, 3), se requiere pulsar la barra espaciadora dos veces.

Por ejemplo, para realizar el comando Ir al principio (el comando estándar es un espacio con puntos 1, 2, 3): pulse la barra espaciadora, luego el punto 1, luego el punto 2, luego el punto 3, y de nuevo la barra espaciadora.

Nota: el funcionamiento de las teclas de navegación y de los sensores de cursor sigue siendo el mismo que en el modo estándar de dos manos.

Para activar / desactivar el modo de una mano:

1. Vaya al menú principal.
2. Seleccione opciones y pulse Enter.
3. Seleccione ajustes de usuario y pulse Enter.
4. Utilice las teclas de navegación anterior y siguiente hasta llegar a la opción modo de una mano.
5. Pulse Enter para activar el modo de una mano.; pulse Enter nuevamente para desactivarlo.

14. Cambiar idioma

Para cambiar el idioma del sistema del Brailiant BI 40X:

1. Vaya al Menú Principal.
2. Seleccione Ajustes.
3. Seleccione Cambiar idioma.
4. Seleccione la opción Idioma y pulse Enter. Aparecerá una lista en la línea Braille.
5. Seleccione el idioma de la lista que desee.
6. Seleccione Cerrar.
7. Se le pedirá que seleccione la opción Reemplazar el perfil de idioma por defecto. Si pulsa Ok, se creará un nuevo perfil de idioma con una tabla Braille que

permitirá leer los menús Braille en el idioma seleccionado. Pulse Cancelar si desea continuar con su perfil de idioma actual.

8. Cuando se le solicite, reinicie el Brailiant para aplicar los cambios.

15. Acceso y uso de los servicios en línea

Este menú de Servicios en línea contiene bibliotecas en línea incluidas en su Brailiant. Los servicios en línea se basan en una suscripción y requieren que introduzca las credenciales de su cuenta.

Nota: Asegúrese de haber establecido conexión a Internet con el Brailiant antes de utilizar los servicios en línea.

Los libros de las bibliotecas en línea se descargan en la carpeta Online-books del Brailiant. Todos los libros se incluyen en la lista principal de libros de la aplicación Biblioteca.

15.1. Activar Bookshare y descargar libros

Bookshare® es una biblioteca en línea de contenidos protegidos por derechos de autor para personas con discapacidades para la comunicación impresa. Más información sobre Bookshare en <http://www.bookshare.org>.

Puede buscar libros y descargarlos en el Brailiant de forma inalámbrica. Los periódicos y las revistas no están disponibles actualmente en la búsqueda en línea.

Para activar el servicio Bookshare y descargar un libro:

1. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta Bookshare.
2. Seleccione su formato de libro preferido (DAISY o BRF).
3. Busque libros por título, autor, texto completo o categorías. También puede buscar los libros más recientes o populares.
4. Pulse Enter o un sensor de cursor sobre un libro para obtener más información.
5. Utilice las teclas de Navegación Anterior y Siguiente para navegar por título, autor y descripción del libro.
6. Pulse Enter en el elemento Descargar para descargar el libro al Brailiant.

15.2. Configuración, gestión y sincronización de una cuenta NFB Newslite

Si usted tiene una cuenta NFB Newslite®, el Brailiant le permite conectar su cuenta y descargar material de lectura de NFB en el Lector de Libros.

Configurar la cuenta: Introduzca sus credenciales de NFB Newslite, seleccione la frecuencia de actualización de los números y determine si su Brailiant debe conservar o eliminar los números obsoletos.

Gestionar publicaciones: Seleccione el material al que desea suscribirse. El material suscrito estará subrayado.

Sincronizar contenido ahora: Descargue los últimos números de sus suscripciones.

15.3. NLS Bard

El Brailiant puede acceder directamente a BARD. Puede ver y descargar libros de la lista de libros más populares y de la lista de libros y revistas más recientes. Puede navegar por categorías temáticas y buscar en la colección. También puede descargar libros y revistas de su lista de deseos, así como añadir y eliminar elementos de la misma. Para poder acceder a BARD, debe conectar su dispositivo a una red Wi-Fi (vea [Conexión a una red Wi-Fi](#) para obtener instrucciones detalladas) y acceda a su cuenta BARD.

15.3.1. Conectarse a BARD por primera vez

Para acceder a BARD, seleccione NLS BARD en el menú de Servicios en línea. La primera vez que lo haga, se le pedirá que introduzca su nombre de usuario y contraseña de BARD. No podrá iniciar sesión con una contraseña temporal. Si tiene una contraseña temporal, tendrá que utilizar un navegador web para crear una contraseña permanente y luego iniciar sesión con esas credenciales.

Después de escribir su nombre de usuario, pulse Enter. Se le pedirá que introduzca su contraseña. Una vez introducida, pulse Enter. Verá brevemente la palabra "cargando..." seguida de "inicio de sesión satisfactorio".

Una vez que haya iniciado la sesión en BARD con éxito, cada vez que entre en NLS BARD, verá "inicio de sesión satisfactorio" y aparecerá el primer elemento del menú de NLS BARD.

15.3.2. Descarga de libros y revistas desde BARD

El menú de NLS BARD contiene los siguientes elementos:

- Los más populares
- Libros más recientes
- Revistas más recientes
- Examinar categorías
- Buscar revistas
- Buscar en la colección
- Lista de deseos
- Descargar historial
- Eliminar cuenta

Cada una de estas opciones de menú le llevará a una lista de libros o revistas. Pulse Enter en un libro para obtener más información. Utilice las teclas de Navegación Anterior y Siguiente para navegar entre el título, el autor y la descripción del libro. Pulse Enter en la opción Descargar si desea descargar el libro en su Brailiant.

15.3.3. Leer un libro descargado

Después de haber descargado un libro o una revista, puede descargar otros elementos, o puede leer uno de ellos. Para leer un elemento, vuelva al Menú Principal pulsando el botón de inicio. Vaya a Biblioteca y pulse Enter. Pulse Enter en la Lista de libros. En ella encontrará los elementos descargados. Pulse Enter sobre el título que desea leer y se encontrará al principio del libro.

15.4. Daisy en línea.

Daisy en línea es un servicio que soporta varias bibliotecas de todo el mundo con contenidos adaptados.

Para acceder a las bibliotecas Daisy en línea soportadas por el dispositivo siga estos pasos:

(Tenga en cuenta que para acceder a las bibliotecas Daisy en línea se requiere disponer de conexión a internet)

1. Seleccione “Servicios en línea” del menú principal y pulse Enter.
2. Utilice las teclas de navegación Anterior y Siguiente hasta el elemento Daisy en línea y pulse Enter.
3. Ahora verá un listado de las cuentas Daisy que hubiera configurado previamente seguido del elemento “Añadir cuenta”. Si no tiene configurada ninguna cuenta para Daisy en línea, el botón “Añadir cuenta” será el primero en mostrarse al abrir la aplicación Daisy en línea. Deberá añadir una cuenta para ver las bibliotecas en línea disponibles. Para hacerlo, pulse Enter y siga las instrucciones siguientes.

15.4.1. Añadir cuenta Daisy

1. Seleccione Servicios en Línea en el menú principal y pulse Enter.
2. Con las teclas de navegación Anterior y Siguiente desplácese hasta Daisy en línea y pulse Enter.
3. Seleccione “Añadir cuenta” y pulse Enter.
4. Se mostrará el listado de bibliotecas disponibles. Seleccione aquella en la que tenga cuenta para configurarla.
5. Introduzca el nombre de usuario para la cuenta.
6. Introduzca la contraseña y pulse Enter.

Si se establece la conexión, recibirá el mensaje “Inicio de sesión correcto” y se añadirá una cuenta en el listado de bibliotecas ya configuradas que verá al abrir la aplicación Daisy en línea.

15.5. Importar configuración

En conjunto con la aplicación HumanWare Companion, el Brailiant permite importar la configuración de una biblioteca a partir de un archivo XML. Este proceso requiere de conexión a internet y de un archivo XML situado en una unidad de almacenamiento

externa. Para descargar la herramienta HumanWare Companion por favor visite https://support.humanware.com/en-international/support/humanware_companion.

15.6. Utilizar el servicio Daisy en línea

Descargar un libro de una biblioteca Daisy configurada en su dispositivo

Para descargar un libro de una biblioteca Daisy configurada en su dispositivo, haga lo siguiente:

1. En el Menú principal, utilice las teclas de navegación Anterior y Siguiente para ir a Servicios en línea y pulse Enter.
2. Desplácese por el listado que aparece hasta Daisy en línea y pulse Enter.
3. Se mostrará un listado con las bibliotecas Daisy configuradas en su dispositivo. Seleccione la que desee y pulse Enter para acceder a los libros de la misma.
4. Aparecerá un listado con los libros ya descargados y el botón “descargar más libros”. Pulse Enter en este botón para acceder a todos los libros que puede descargar de esta biblioteca.
5. Pulse las teclas de navegación Anterior y Siguiente para recorrer la lista y seleccione el libro que quiera descargar. Pulse Espacio + M para ir al menú de contexto y pulse Enter en “Descargar”. El libro pasará a la cola de descargas.

Nota: si sitúa el cursor en alguna de las bibliotecas que tenga configuradas y pulsa Espacio + M, tendrá la posibilidad de cambiar el método de descarga (manual que es el valor predeterminado, o automática), modificar la información de inicio de sesión o eliminar esa cuenta.

15.7. leer un libro descargado

Después de haber descargado un libro o una revista, puede continuar descargando más elementos o leer alguno de ellos. Para leer un elemento:

1. vuelva al Menú principal pulsando el botón de Inicio.
2. Desplácese hasta el elemento Victor Reader y pulse Enter.
3. Vaya al apartado lista de libros. Aquí encontrará los libros que haya descargado.
4. Pulse Enter en el título que desea leer y se situará al principio del libro.

16. Modo de Examen

El modo de Examen se utiliza para bloquear ciertas funciones y aplicaciones del Brailiant durante un tiempo determinado. Mientras el modo de Examen esté activo, sólo tendrá acceso a las funciones del Terminal. Tenga en cuenta que, en el modo de Examen, la conexión Bluetooth estará desactivada; el modo de Terminal sólo es accesible a través de USB. Todas las demás aplicaciones y el uso de una memoria externa (unidad USB o tarjeta SD) estarán bloqueados mientras este modo esté activo.

Al activar el modo de Examen, se le pedirá que introduzca un tiempo entre 1 y 360 minutos (6 horas) y se le pedirá que introduzca una contraseña para desactivar el modo de Examen.

Para desbloquear el dispositivo, tendrá que esperar a que se agote el tiempo seleccionado o introducir la contraseña seleccionada.

Al reiniciar el dispositivo, si el periodo establecido aún no se ha completado, el dispositivo volverá automáticamente al modo de Examen.

Para activar el modo de Examen:

1. Vaya al Menú Principal.
2. Seleccione Ajustes.
3. Pulse Enter.
4. Vaya a Activar modo de Examen.
5. Pulse Enter.
6. Introduzca el tiempo que desee (entre 1 y 360 minutos).
7. Introduzca la contraseña elegida para activar el modo de Examen.
8. Pulse Enter.

17. Especificaciones técnicas

17.1. Componentes de navegación

- 4 teclas de navegación
- Teclado braille de 8 teclas
- 2 barras espaciadoras
- Sensores de movimiento del cursor

17.2. Batería de larga duración

- Hasta 20 horas de autonomía
- Recarga desde el PC a través del puerto USB
- Apagado automático
- Batería de polímero de iones de litio
- Compatible con cualquier adaptador USB A/C estándar

17.3. Conectividad

- USB 2.0
- Tarjeta SD
- Wi-Fi 2.4 GHz
- Bluetooth V4.2

17.4. Portabilidad

Dimensiones: 166 mm x 100 mm x 23 mm

Peso : Máximo 450 g

18. Actualización del Brailiant BI 40X

18.1. Actualización manual del Brailiant BI 40X

Si está conectado a Internet con el Brailiant, puede comprobar manualmente si hay una actualización disponible.

Para buscar una actualización manualmente:

1. Vaya al Menú Principal
2. Seleccione Ajustes.
3. Pulse Enter
4. Seleccione Actualización de software
5. Pulse Enter
6. Seleccione Buscar actualización
7. Pulse Enter

Si se le propone una nueva actualización, seleccione Descargar con la tecla de Navegación Anterior o Siguiente para descargar la actualización ahora o Recordar más tarde para actualizar más tarde. Puede seguir utilizando el Brailiant mientras se descarga la actualización.

Tenga en cuenta que el dispositivo debe estar enchufado y la batería debe estar cargada más del 50% para que se efectúe la actualización.

Después de unos minutos, el Brailiant le preguntará si instala la actualización descargada. Seleccione Aceptar para instalarla. El Brailiant se reiniciará y en la línea braille aparecerá una barra de progreso.

Al final del proceso de actualización, se mostrarán los 8 puntos de las 20 celdas braille y luego el dispositivo se apagará.

18.2. Actualización del Brailiant BI 40X por USB o tarjeta SD

Si su dispositivo no está conectado a Internet, también puede descargar el archivo de actualización a un ordenador y transferirlo a una unidad flash USB o a una tarjeta SD.

Para actualizar el Brailiant por USB o SD:

1. Inserte la unidad flash USB o tarjeta SD que contenga el archivo de actualización en el dispositivo. Tenga en cuenta que el archivo de actualización tiene que estar ubicado en la raíz de la unidad USB o de la tarjeta SD.
2. Cuando el Brailiant detecta un archivo de actualización en la unidad USB o en la tarjeta SD, la línea braille indicará que hay una actualización disponible para su instalación.

3. Utilice la tecla de Navegación Siguiendo para llegar a la opción Aceptar, y pulse Enter para activar la actualización indicada. El dispositivo se apagará y reiniciará para procesar la actualización.

18.3. Función de comprobación automática de actualizaciones

Por defecto, está activada la función de comprobación automática de actualizaciones. Si está conectado a Internet, el Brailiant busca con frecuencia si hay una nueva actualización disponible para descargar.

Para desactivar/activar la función de comprobación automática de actualizaciones, siga los siguientes pasos:

1. Vaya al Menú Principal
2. Seleccione Ajustes
3. Pulse Enter
4. Vaya a Actualización de software
5. Pulse Enter
6. Seleccione Comprobación automática de actualizaciones
7. Pulse Enter para activar/desactivar la función

Tenga en cuenta que cuando está activado, el Brailiant comprobará cada 23 horas si hay una nueva actualización disponible.

19. Asistencia al cliente

Para obtener asistencia al cliente, póngase en contacto con la oficina de HumanWare más cercana o visite nuestro sitio web en: www.humanware.com/support

Global: support@humanware.com

América del Norte: 1 800 722-3393
us.support@humanware.com

Europa: (0044) 1933 415 800
eu.support@humanware.com

Australia / Asia: (02) 9686 2600
au.sales@humanware.com

20. Aviso y atribuciones de marca registrada

macOS es una marca registrada de Apple Inc.

JAWS es una marca registrada de Freedom Scientific, Inc. en Estados Unidos y otros países.

Bookshare® es una marca registrada de Beneficent Technology, Inc.

NFB Newslines es una marca registrada de National Federation of the Blind

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

IOS es una marca registrada de Cisco en EE.UU. y otros países y se usa bajo licencia.

Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

21. Acuerdo de licencia de usuario final

Al usar este producto (Brailleiant BI 40X), usted acepta los siguientes acuerdos mínimos:

1. Concesión de licencia. HumanWare concede al usuario final un derecho y una licencia no exclusivos e intransferibles para utilizar el software en este producto.
2. Propiedad del software. El usuario final reconoce que HumanWare conserva todos los derechos, títulos e intereses sobre el original y las copias del software incorporado en este producto. El usuario final se compromete a no modificar, portar, traducir, descompilar, desensamblar, realizar ingeniería inversa ni hacer público de ninguna forma el software de este producto.

22. Garantía

Garantía del fabricante

Este dispositivo es un producto de alta calidad, construido y embalado con cuidado. Todas las unidades y componentes están garantizados contra cualquier defecto de funcionamiento durante 2 años para todos los países.

La garantía cubre todas las piezas (excepto la batería) y la mano de obra. Si se produce algún defecto, póngase en contacto con su distribuidor local o con la línea de asistencia técnica del fabricante.

Nota: Las condiciones de la garantía pueden cambiar periódicamente, consulte nuestro sitio web para obtener la información más reciente.

Condiciones y limitaciones:

Guarde la factura de compra en un lugar seguro, ya que puede ser necesaria para una reparación o sustitución en garantía. Conserve el original. Si la unidad tiene que ser devuelta, por favor utilice el embalaje original. Esta garantía se aplica a todos los casos en los que el daño no es resultado de un uso inadecuado, maltrato, negligencia o caso fortuito.

América del Norte: Además de la garantía, puede adquirir un contrato de servicio para prolongar la cobertura durante un año y beneficiarse también del servicio de mantenimiento. Consulte nuestra página web: <http://www.humanware.com/>

O contáctenos por correo electrónico a us.info@humanware.com o llame al 1(800) 722-3393

Apéndice A: Resumen de comandos

Atajos/combinaciones de teclas

Acción	Atajo o combinación de teclas
Activar el elemento seleccionado	Enter o un sensor de cursor
Escapar o volver	Espacio + E
Elemento anterior	Tecla de navegación Anterior Espacio + Punto 1
Elemento siguiente	Tecla de navegación Siguiente o Espacio + Punto 4
Saltar a cualquier elemento de una lista	Escribir la inicial del elemento o aplicación
Desplazamiento a la izquierda o a la derecha	Tecla de desplazamiento Izquierda o Derecha
Ir al principio	Espacio + Puntos 1-2-3
Ir al final	Espacio + Puntos 4-5-6
Alternar el grado braille	Retroceso + G
Cambiar perfil de idioma	Enter + L
Nivel de batería	Enter + P
Menú de contexto	Espacio + M
Menú principal	Espacio + Puntos 1-2-3-4-5-6 o botón de Inicio
Información del sistema	Espacio + I
Hora	Enter + T
Fecha	Enter + D
Expulsar medio	Enter + E
Ajustes	Espacio + O
Crear una nota rápida	Retroceso + N
Crear una nota rápida braille	Retroceso + B
Activar/desactivar la síntesis de voz	Espacio + tecla de navegación anterior
Aumentar velocidad de la voz	Enter + punto 5
Disminuir velocidad de la voz	Enter + punto 2
Abrir modo terminal	Retroceso + Enter + T
Abrir Editor	Retroceso + Enter + E
Abrir Victor Reader	Retroceso + Enter + V
Abrir Gestor de archivos	Retroceso + Enter + F
Abrir Calculadora	Retroceso + Enter + C

Acción	Atajo o combinación de teclas
Abrir Bookshare	Espacio + enter + B
Abrir Nfb newslne	Espacio + enter + W
Abrir NLS bard	Espacio + Enter + N

Comandos del Editor

Acción	Atajo o combinación de teclas
Activar modo de edición	Enter o un sensor de cursor
Salir del modo de edición	Espacio + E
Crear archivo	Retroceso + N
Abrir archivo	Retroceso+ O
Guardar	Espacio + S
Guardar como	Retroceso + S
Buscar	Espacio + F
Buscar siguiente	Espacio + N
Buscar anterior	Espacio + P
Reemplazar	Retroceso + F
Inicio/fin de selección	Enter + S
Seleccionar todo	Enter + Puntos 1-2-3-4-5-6
Copiar	Retroceso + Y
Cortar	Retroceso + X
Pegar	Retroceso + V
Borrar palabra anterior	Retroceso + Punto 2
Borrar palabra actual	Retroceso + Puntos 2-5
Borrar carácter anterior	Retroceso
Pasar al siguiente cuadro de edición mientras se edita	Enter
Pasar al siguiente cuadro de edición sin editar	Tecla de navegación Siguiente
Pasar al cuadro de edición anterior sin editar	Tecla de navegación Anterior
Mover el cursor al inicio del campo de texto del documento	Espacio + Puntos 1-2-3
Mover el cursor al final del campo de texto del documento	Espacio + Puntos 4-5-6
Iniciar auto desplazamiento	Enter + Puntos 1-2-4-5-6

Acción	Atajo o combinación de teclas
Incrementar la velocidad de auto desplazamiento	Enter + Punto 6
Ralentizar la velocidad de auto desplazamiento	Enter + Punto 3
Leer todo (síntesis de voz)	Espacio + G
Detener lectura (síntesis de voz)	Retroceso + enter
Cambiar el modo de lectura	Espacio+ X
Menú de marcadores	Enter + M
Ir a marcador	Enter + J
Insertar marcador	Enter + B

Comandos del Editor Braille

Acción	Atajo o combinación de teclas
Activar modo de edición	Enter o un sensor de cursor
Salir del modo de edición	Espacio + E
Crear archivo braille	Retroceso + B
Abrir archivo braille	Retroceso+ O
Guardar	Espacio + S
Guardar como	Retroceso + S
Buscar	Espacio + F
Buscar siguiente	Espacio + N
Buscar anterior	Espacio + P
Reemplazar	Retroceso + F
Inicio/fin de selección	Enter + S
Seleccionar todo	Enter + Puntos 1-2-3-4-5-6
Copiar	Retroceso + Y
Cortar	Retroceso + X
Pegar	Retroceso + V
Borrar palabra anterior	Retroceso + Punto 2
Borrar palabra actual	Retroceso + Puntos 2-5
Borrar carácter anterior	Retroceso

Acción	Atajo o combinación de teclas
Pasar al siguiente cuadro de edición mientras se edita	Enter
Pasar al siguiente cuadro de edición sin editar	Tecla de navegación siguiente
Pasar al cuadro de edición anterior sin editar	Tecla de navegación anterior
Mover el cursor al inicio del campo de texto del documento	Espacio + Puntos 1-2-3
Mover el cursor al final del campo de texto del documento	Espacio + Puntos 4-5-6
Iniciar auto desplazamiento	Enter + Puntos 1-2-4-5-6
Incrementar la velocidad de auto desplazamiento	Enter + Punto 6
Ralentizar la velocidad de auto desplazamiento	Enter + Punto 3
Alternar el modo de lectura Espacio+ X	
Menú de marcadores	Enter + M
Saltar a un marcador	Enter + J
Insertar marcador	Enter + B

Comandos del lector de libros para libros de texto

Acción	Atajo o combinación de teclas
Lista de libros	Espacio + B
Gestor de libros	Retroceso + M
Ir a opción de Menú	Enter + G
Menú de marcadores	Enter + M
Ir a marcador	Enter + J
Insertar marcador rápido	Enter + B
Mostrar marcadores resaltados	Enter + H
Abrir nivel de navegación	Espacio + T
Elemento anterior	Tecla de Navegación Anterior
Siguiente elemento	Tecla de Navegación Siguiente
Ir al nivel de navegación anterior	Retroceso + Punto 3
Ir al nivel de navegación siguiente	Retroceso + Punto 6
Iniciar auto desplazamiento	Enter + Puntos 1-2-4-5-6

Acción	Atajo o combinación de teclas
Incrementar velocidad de auto desplazamiento	Enter + Punto 6
Ralentizar velocidad de auto desplazamiento	Enter + Punto 3
Leer todo (síntesis de voz)	Espacio + G
Detener lectura (síntesis de voz)	Retroceso + Enter
Dónde estoy	Espacio + Puntos 1-5-6
Información	Espacio + I
Ir al principio del libro	Espacio + Puntos 1-2-3
Ir al final del libro	Espacio + Puntos 4-5-6
Abrir libros recientes	Enter + R
Buscar libros o texto	Espacio + F
Buscar siguiente	Espacio + N
Buscar anterior	Espacio + P
Siguiente línea no en blanco	Enter + Punto 4
Línea no en blanco anterior	Enter + Punto 1
Carácter anterior	Espacio + Punto 3
Siguiente carácter	Espacio + Punto 6
Palabra anterior	Espacio + Punto 2
Siguiente palabra	Espacio + Punto 5
Frase anterior	Espacio + Puntos 2-3
Siguiente frase	Espacio + Puntos 5-6
Iniciar o finalizar la selección	Enter + S
Seleccionar todo (párrafo actual)	Enter + Puntos 1-2-3-4-5-6
Copiar (párrafo actual)	Retroceso + Y
Borrar libro	Retroceso + Puntos 2-3-5-6

Comandos del lector de libros para audiolibros

Acción	Atajo o combinación de teclas
Lista de libros	Espacio + B
Gestor de libros	Retroceso + M
Ir a opción de Menú	Enter + G
Menú de marcadores	Enter + M
Ir a marcador	Enter + J
Insertar marcador rápido	Enter + B

Acción	Atajo o combinación de teclas
Mostrar marcadores resaltados	Enter + H
Abrir nivel de navegación	Espacio + T
Elemento anterior	Tecla de Navegación Anterior
Siguiente elemento	Tecla de Navegación Siguiente
Ir al nivel de navegación anterior	Retroceso + Punto 3
Ir al nivel de navegación siguiente	Retroceso + Punto 6
Dónde estoy	Espacio + Puntos 1-5-6
Información	Espacio + I
Ir al principio del libro	Espacio + Puntos 1-2-3
Ir al final del libro	Espacio + Puntos 4-5-6
Abrir libros recientes	Enter + R
Borrar libro	Retroceso + Puntos 2-3-5-6
Reproducir audiolibro	Espacio + G
Detener la lectura	Retroceso + Enter
Avance rápido 5 segundos	Tecla de navegación derecha (pulsación corta)
Retroceder 5 segundos	Tecla de navegación izquierda (pulsación corta)
Avance rápido (saltos más largos de tiempo)	Tecla de navegación derecha (pulsación larga)
Retroceder (saltos más largos de tiempo)	Tecla de navegación izquierda (pulsación larga)
Incrementar velocidad de lectura	Enter + Punto 5
Ralentizar velocidad de lectura	Enter + Punto 2

Comandos del Gestor de Archivos

Acción	Atajo o combinación de teclas
Crear nueva carpeta	Espacio + N
Información del archivo	Espacio + I
Marcar/Desmarcar	Retroceso + L
Marcar todo/Desmarcar todo	Enter + Puntos 1-2-3-4-5-6
Renombrar archivo	Retroceso + R
Borrar archivo	Retroceso + Puntos 2-3-5-6
Copiar archivo	Retroceso + Y
Cortar archivo	Retroceso + X
Pegar archivo	Retroceso + V

Acción	Atajo o combinación de teclas
Buscar archivo	Espacio + F
Ordenar archivos	Espacio + V
Dónde estoy	Espacio + Puntos 1-5-6
Seleccionar unidad	Espacio + D
Ir a la carpeta principal	Espacio + E
Expulsar medio	Enter + E

Comandos de la calculadora utilizando braille computerizado

Acción	Atajo o combinación de teclas
Más	Puntos 2-3-5
Menos	Puntos 3-6
Multiplicación	Puntos 2-5-6
División	Puntos 3-4-7-8
Igual	Enter
Borrar	Espacio + Puntos 3-5-6
Punto decimal	Punto 3
Porcentaje	Puntos 1-5-6
Raíz Cuadrada	Espacio + Puntos 3-4-5
Pi	Espacio + Y

Apéndice B: Tablas Braille

Español 8 puntos Braille Computerizado (Unicode - UTF8)

Símbolos y números

Ordinal masculino: ‘o’ 5,6,7,8

Ordinal femenino: ‘a’ 2,3,5,6,8

Cerrar admiración: ‘!’ 2,3,5,7

Comillas: ‘”’ 5,6

Punto medio: ‘·’ 1,4,6,7,8

Dólar: ‘\$’ 1,2,3,4,6,7

Tanto por ciento: ‘%’ 4,5,6

Ampersand: ‘&’ 1,2,3,4,6

Barra: ‘/’ 3,4,7,8

Abrir paréntesis: ‘(’ 1,2,6,8

Cerrar paréntesis: ‘)’ 3,4,5,7

Igual: ‘=’ 2,3,5,6

Cerrar interrogación: ‘?’ 2,6

Apóstrofo: ‘’ 4

Abrir interrogación: ‘¿’ 2,6,7

Abrir admiración: ‘¡’ 2,3,5,6,7

Barra invertida: ‘\’ 5,6,7,8

Barra vertical: ‘|’ 4,5,6,8

Arroba: ‘@’ 5

Almohadilla: ‘#’ 3,4,5,6

Virgulilla: ‘~’ 5,7

Euro: ‘€’ 1,5,6

Negación: ‘¬’ 2,5,7

Abrir corchete: ‘[’ 2,3,6,7

Asterisco: ‘*’ 3,5,6,8

Suma: ‘+’ 2,3,5

Cerrar corchete: ‘]’ 3,5,6,8

Abrir llave: '{' 4,6

Cerrar llave: '}' 3,5

Cedilla: 'Ç' 1,2,3,4,6,8

Menor que: '<' 3,5,6

Mayor que: '>' 3,4,6

Coma: ',' 2

Punto y coma: ';' 2,3

Punto: '.' 3

Dos puntos: ':' 2,4

Guion: '-' 3,6

Subraya: '_' 6

Libra: '£' 2,3,7,8

'0': 3,4,6,7,8

'1': 1,6

'2': 1,2,6

'3': 1,4,6

'4': 1,4,5,6

'5': 1,5,6

'6': 1,2,4,6

'7': 1,2,4,5,6

'8': 1,2,5,6

'9': 2,4,6

Letras mayúsculas

'A': 1,7

'B': 1,2,7

'C': 1,4,7

'D': 1,4,5,7

'E': 1,5,7

'F': 1,2,4,7

'G': 1,2,4,5,7

'H': 1,2,5,7

'I': 2,4,7
'J': 2,4,5,7
'K': 1,3,7
'L': 1,2,3,7
'M': 1,3,4,7
'N': 1,3,4,5,7
'Ñ': 1,2,4,5,6,7
'O': 1,3,5,7
'P': 1,2,3,4,7
'Q': 1,2,3,4,5,7
'R': 1,2,3,5,7
'S': 2,3,4,7
'T': 2,3,4,5,7
'U': 1,3,6,7
'V': 1,2,3,6,7
'W': 2,4,5,6,7
'X': 1,3,4,6,7
'Y': 1,3,4,5,6,7
'Z': 1,3,5,6,7
'Â': 1,7,8
'Ê': 1,5,7,8
'Î': 2,4,7,8
'Ô': 1,3,5,7,8
'Û': 1,3,6,7,8
'À': 1,2,3,5,6,7,8
'È': 2,3,4,6,7,8
'Ì': 3,4,5
'Ò': 2,4,5,8
'Ù': 2,3,4,5,6,7,8
'Ä': 3,4,5,7,8
'Ë': 1,2,4,6,7,8

'İ': 1,2,4,5,6,7,8

'Ö': 2,4,6,7,8

'Ü': 1,2,5,6,7,8

'Á': 1,2,3,5,6,7

'É': 2,3,5,6,7

'Í': 3,4,7

'Ó': 3,4,6,7

'Ú': 2,3,4,5,6,7

Letras minúsculas

'a': 1

'b': 1,2

'c': 1,4

'd': 1,4,5

'e': 1,5

'f': 1,2,4

'g': 1,2,4,5

'h': 1,2,5

'i': 2,4

'j': 2,4,5

'k': 1,3

'l': 1,2,3

'm': 1,3,4

'n': 1,3,4,5

'ñ': 1,2,4,5,6

'o': 1,3,5

'p': 1,2,3,4

'q': 1,2,3,4,5

'r': 1,2,3,5

's': 2,3,4

't': 2,3,4,5

'u': 1,3,6

'v': 1,2,3,6
'w': 2,4,5,6
'x': 1,3,4,6
'y': 1,3,4,5,6
'z': 1,3,5,6
'ā': 1,8
'ē': 1,5,8
'ī': 2,4,8
'ō': 1,3,5,8
'ū': 1,3,6,8
'à': 1,2,3,5,6,8
'è': 2,3,4,6,8
'ì': 3,4,8
'ò': 3,4,6,8
'ù': 2,3,4,5,6,8
'ä': 3,4,5,8
'ë': 1,2,4,6,8
'ï': 2,5,8
'ö': 2,4,6,8
'ü': 1,2,5,6,8
'á': 1,2,3,5,6
'é': 2,3,5,6
'í': 3,4
'ó': 3,4,6
'ú': 2,3,4,5,6