

PC01ID00CL42LP29AM12PP01PD07PF00FD05PT00AN00AC00AS00AT00NG00NP
00IP00 Manual de referencia rápida
BÁSCULA DE BAÑO PARLANTE MEDISANA PS 425

Descripción:

En la parte trasera de la báscula se encuentra el compartimento para las pilas, con su correspondiente tapa **(1)**.

En el lateral superior, en el centro, se encuentra: la rueda de ajuste para regular el volumen **(2)** y el botón para ajustar el idioma y la unidad de peso **(3)**.

Funcionamiento:

Sustitución/cambio de las baterías

Antes de utilizar su balanza digital, coloque las 3 pilas suministradas (1,5 V, tipo AAA) en el aparato. Para ello, abra el compartimento de pilas **(1)** del lado inferior del aparato y coloque las pilas. Al hacerlo, tenga en cuenta la polaridad. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas y presiónela hasta que encaje de forma audible. Por defecto, la báscula hablará en castellano y verbalizará el peso en kilogramos. Cambie las pilas cuando en la pantalla aparece el símbolo de cambio de pilas “Lo”, o cuando no se indica nada en la pantalla, después de accionar el aparato.

Cambio de la unidad de peso

Presione brevemente en el centro de la superficie de la báscula. En la pantalla aparecerá “0.0”. Podrá seleccionar con el botón la unidad de peso (kg - lb) deseada, manteniendo pulsado durante 3 segundos el botón **(3)**.

Rango de medición de hasta 180 kg.

Selección de idioma

Presione brevemente en el centro de la superficie de la báscula. En la pantalla aparecerá “0.0”. Pulsando varias veces seguidas el botón anteriormente empleado para cambiar la unidad de peso **(3)**, también se podrá seleccionar el idioma deseado: (alemán [DE], inglés [GB], francés [FR], español [ES]) .

Con la rueda de ajuste **(2)** se puede ajustar en cualquier momento el volumen de la voz. Si no se realiza ninguna operación, la báscula se desconecta automáticamente tras aproximadamente 10 segundos. Estará ahora lista para la función “Step-on” (proceso de pesado).

Pesar / Función “Step-on”

1. Asegúrese de que la báscula se encuentre sobre un suelo plano. Si desea pesarse pero acaba de mover la báscula previamente, deberá iniciarla. Para hacerlo, pulse con el pie el centro de la superficie de la báscula. En la pantalla aparecerá “0.0”. Cuando la báscula se haya desconectado, estará lista para la función “Step-on”. Si la báscula no se ha movido previamente, no es necesario este proceso.
2. Súbase a la báscula y permanezca de pie. El dispositivo se conectará automáticamente.
3. Se calculará su peso y se mostrará en la pantalla, al tiempo que se indicará por voz.

4. Baje de la báscula. La báscula se desconectará tras aproximadamente 10 segundos si no realiza ninguna operación.