

MANUAL DE USUARIO

COLORINO

Descripción del equipo:

Coloque el **Colorino** delante de UD, de forma que el altavoz (situado en la superficie del aparato) le quede enfrente. A continuación del altavoz (casi en el centro) hay dos botones. Más abajo en esta misma cara, y en la posterior existen unas aperturas para enhebrar un cordón, con la finalidad de poder colgárselo.

En el lateral derecho hay dos conectores, el que está más arriba es para los auriculares, el que está más abajo es un interface, para actualización del software del **Colorino**.

En la parte posterior, encontramos el compartimento de pilas.

En la parte superior se localiza el instrumento de detección e identificación, es decir una lente, que funciona como "ojo artificial".

Descripción de las teclas:

Tecla de identificación de colores: es la tecla más cercana al altavoz

Tecla de detección de luz: es la tecla más alejada del altavoz

Manejo del aparato:

Coloque el identificador boca abajo (de manera que la lente apunte hacia UD y el compartimento de pilas quede hacia arriba.) Presione la pequeña pestaña hacia abajo y luego quite la tapa del compartimento totalmente, tirando hacia UD. Inserte dos pilas de 1.5 Voltios AAA Micro, asegurándose que el lado plano (negativo) de la pila izquierda está hacia UD, y el lado plano de la pila derecha está en la otra dirección. Coloque las dos lengüetas de la tapa en las dos ranuras que se encuentran en la parte inferior del compartimento de pilas y cierre la tapa empujándola hasta que oiga un clic.

Identificación de colores:

Coloque firmemente el instrumento de medición de modo perpendicular sobre una superficie y pulse la tecla de identificación una vez (la tecla más cercana al altavoz). Entonces el **Colorino** anunciará mediante voz el color identificado (por ejemplo «rojo».) Si mantiene la tecla pulsada continuamente, el **Colorino** repetirá el color hasta que deje de pulsar la tecla.

Medición de luz:

Mueva el aparato para buscar las fuentes de luz mientras mantiene pulsada la tecla de medición de luz (la tecla más alejada del altavoz), y el **Colorino** emitirá distintos sonidos, en función de la cercanía de dichas fuentes, así como de la intensidad de las mismas. Cuanto más alto sea el sonido, tanto más cerca o intensa estará la fuente de luz. Cuanto más bajo sea el sonido, tanto más alejada, u oscura será la fuente de luz.

Regulación de volumen:

El **Colorino** ofrece la posibilidad de regular el volumen. Para ajustar el volumen, mantenga la tecla de medición de luz apretada y al mismo tiempo apriete la tecla de identificación. De esta forma puede elegir entre 3 niveles de volumen (bajo – medio – alto).

Datos técnicos y garantía:

Medición de colores hasta	150 colores y matices de colores
Medición de luz	Señala la dirección y la intensidad de una fuente de luz de hasta más de 10 000 sonidos diferentes
Voz	Disponible en 14 idiomas diferentes
Regulación de volumen	3 niveles de volumen conector de auriculares
Dimensiones	(110) x (39 - 50) x (21 - 25) mm Largo x (ancho mínimo - ancho máximo) x (grosor mínimo - grosor máximo)
Peso	70 g
Fuente de energía	2 x pilas de 1.5V del tipo AAA Micro
Garantía	Un año

CARETEC GmbH
Stubenbastei 1
A -1010 Vienna, Austria
Tel: (+43 1) 5138081-0
Fax: (+43 1) 5138081-9
office@caretec.at
www.caretec.at