

Guía de usuario

BELLMAN VIGILABEBES BE1491



Contenido

Lea esto primero.....	3
Descripción general	3
Instalación.....	4
Comprobación	4
Ajustes.....	5
Sensibilidad.....	5
Retardo	5
Instalación de una esterilla de contacto.....	5
Advertencias generales	6
Advertencias de peligro	6
Información acerca de la seguridad del producto	6
Condiciones de funcionamiento	7
Limpieza	7
Servicio y soporte	7
Condiciones de la garantía	7
Explicación de los símbolos.....	8
Solución de problemas.....	8
Especificaciones técnicas	9
Información sobre el cumplimiento.....	9

Lea esto primero

Este folleto le ofrece una guía sobre cómo utilizar y mantener su nuevo Monitor de bebé. Asegúrese de leerlo detenidamente, incluida la sección de Advertencias. Si tiene más preguntas, póngase en contacto con su profesional de la audición


Finalidad. La finalidad del sistema de alertas Visit es alertar a las personas sordas y con problemas de audición sobre señales importantes en su hogar.

Usuario previsto. El usuario previsto es una persona con sordera o pérdida auditiva de leve a severa.

Grupo de usuarios previsto. Este producto va dirigido a personas de todas las edades con sordera o una pérdida auditiva de leve a severa, que necesiten amplificación auditiva, visual o sensorial.


Principio de funcionamiento. El sistema de alerta Visit consiste en un conjunto de transmisores y receptores conectados de forma inalámbrica que se colocan por toda la casa. Cuando un transmisor detecta actividad, envía una señal al receptor Visit, que alerta al usuario con sonido, destellos o vibraciones. Para utilizar el sistema, se necesita al menos un transmisor y un receptor.

Descripción general

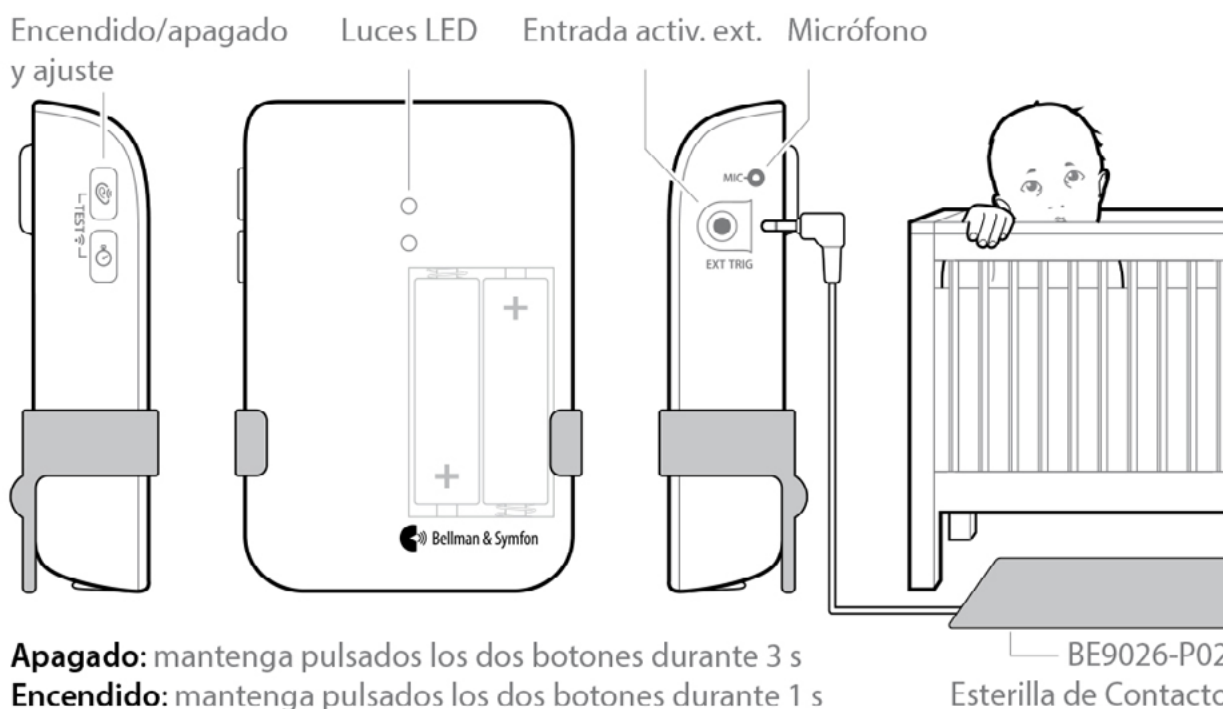


Instalación

1. Retire la pestaña de las pilas para iniciar el monitor para bebés.
2. Coloque el monitor para bebés en la mesilla de noche o cuélguelo de la pared con el tornillo y el enganche. La distancia recomendada es entre 0,5 y 2 m del alcance del niño.

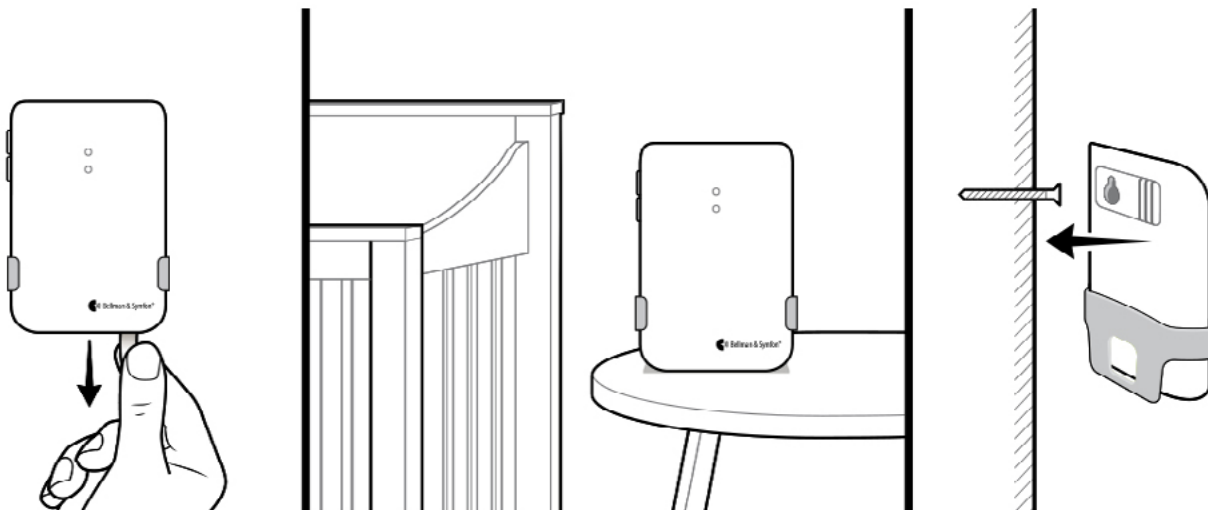

Comprobación

1. Póngase junto a la cama del niño y haga ruido.
2. En el receptor Visit se ilumina un símbolo de chupete y se emite sonido, luz o vibraciones (según el receptor). Si no reacciona, lea el apartado **Ajustes**.

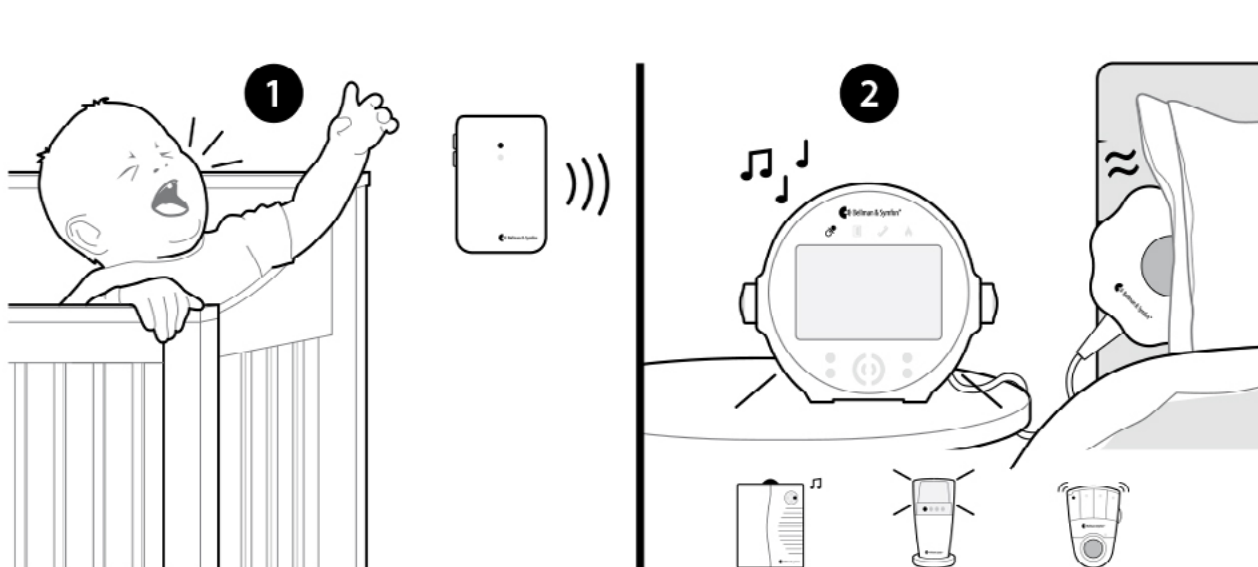

Ajustes

Los botones de sensibilidad y retardo están situados en el lado izquierdo del monitor para bebés. Cuando pulsa un botón, el LED indica el ajuste actual. Pulse repetidamente para configurar el ajuste.

- Si el monitor para bebés no se activa cuando el bebé llora – aumente la sensibilidad.
- Si el monitor para bebés se activa con demasiada facilidad – reduzca la sensibilidad.
- Si el monitor para bebés tarda muy poco o mucho en activarse – ajuste el retardo.

Sensibilidad

LED rojo 65 dB

LED naranja 75 dB


LED verde 85 dB

Retardo

LED rojo 30 s


LED naranja 10 s

LED verde 1 s

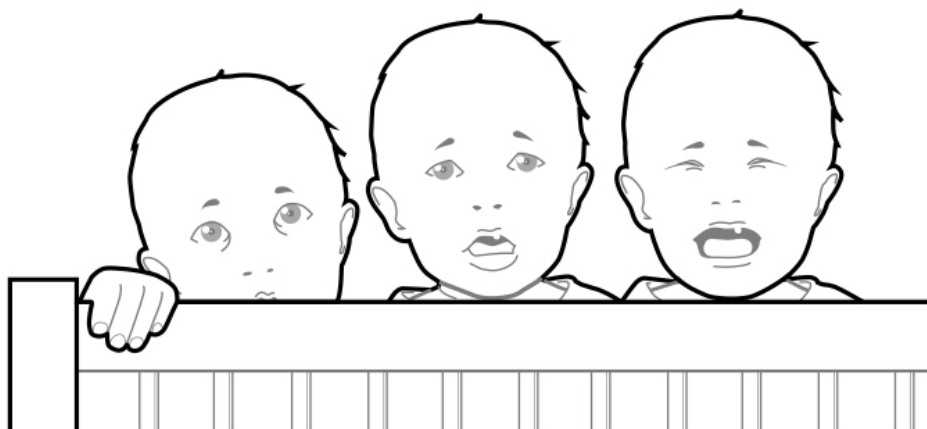

Instalación de una esterilla de contacto

Con una esterilla de contacto también puede saber si su hijo sale de la cama. Solo tiene que colocar la esterilla delante de la cuna, conectarla al monitor para bebés y este le avisará cuando el niño la pise.

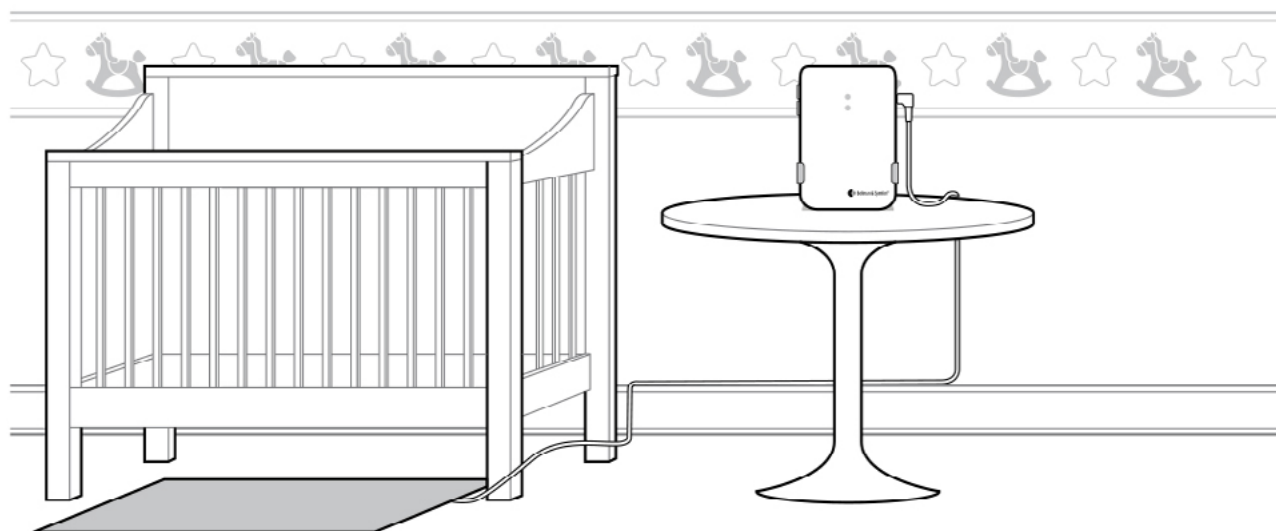

Advertencias generales

Esta sección contiene información importante sobre seguridad, manejo y condiciones de funcionamiento. Guarde este folleto para su uso futuro. Si usted solamente va a instalar el dispositivo, este folleto deberá proporcionarse al dueño

Advertencias de peligro

- No seguir estas instrucciones de seguridad podría resultar en incendio, descarga eléctrica u otras lesiones o daños en el dispositivo o en otra propiedad.
- Asegúrese de mantener el dispositivo fuera del alcance de los niños menores de 3 años. Nunca coloque el dispositivo dentro de la cuna o el parque del niño.
- Tenga en cuenta que las alarmas y notificaciones pueden perderse si se agotan las pilas.
- Utilice solo los tipos de pilas que se especifican en este folleto.
- Este dispositivo está diseñado únicamente para uso en interiores. No exponga el dispositivo a la humedad.
- Proteja el dispositivo contra descargas durante el almacenamiento y el transporte.
- Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con la guía del usuario, puede causar interferencias adversas en las comunicaciones por radio. No utilice ni almacene este dispositivo cerca de fuentes de calor como llamas vivas, radiadores, hornos u otros dispositivos que generen calor.
- No desmonte el dispositivo; existe riesgo de descarga eléctrica. La manipulación o desmontaje del dispositivo anulará la garantía.
- Proteja los cables de cualquier posible fuente de daños.
- No realice cambios ni modificaciones en este dispositivo. Utilice únicamente accesorios Bellman & Symfon originales para evitar descargas eléctricas.
- Las baterías son tóxicas. ¡No ingerir! Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. En caso de que se ingieran, ¡consulte al médico de inmediato!

Información acerca de la seguridad del producto

- De no seguir estas instrucciones podrían producirse daños en el dispositivo y anularse la garantía.
- No exponga las pilas al fuego ni a la luz solar directa.
- No deje caer su dispositivo. La caída sobre una superficie dura podría dañarlo.
- No utilice el dispositivo en áreas donde los equipos electrónicos estén prohibidos.
- El dispositivo solo debe ser reparado por un centro de servicio autorizado.
- En el caso de que ocurra algún incidente grave en relación con este dispositivo, póngase en contacto con el fabricante y la autoridad competente. En el caso de tener otros problemas con su dispositivo, póngase en contacto con el punto de venta, su oficina local de Bellman & Symfon o el fabricante. Visite bellman.com para obtener la información de contacto.
- Ninguna compañía, empresa o usuario está autorizado a cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión o alterar las características originales o el rendimiento en un dispositivo de radiofrecuencia de baja potencia aprobado.
- Este dispositivo no debe utilizarse en aviones a menos que el personal de vuelo lo permita específicamente.

Condiciones de funcionamiento

Utilice el dispositivo en un entorno seco dentro de los límites de temperatura y humedad que se indican en este folleto. Si el producto se moja o se expone a la humedad, debe dejar de considerarse fiable y, por lo tanto, debe reemplazarse.

Limpieza

Desconecte todos los cables antes de limpiar su dispositivo. Utilice un paño suave sin pelusas. Evite que entre humedad por las aperturas. No utilice productos de limpieza domésticos, espráis en aerosol, disolventes, alcohol, amoníaco, agentes abrasivos o aire comprimido.

Servicio y soporte

Si el producto parece dañado o no funciona correctamente, siga las instrucciones de la guía del usuario. Si el producto sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con su profesional local de la audición para obtener más información sobre el servicio y la garantía.

Condiciones de la garantía

Bellman & Symfon ofrece una garantía para este producto (exceptuando la batería) de dos (2) años a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto que se deba a materiales o fabricación defectuosos. Esta garantía solo se aplica en condiciones normales de uso y servicio, y no incluye los daños resultantes de accidentes, negligencia, mal uso, desmontaje no autorizado o contaminación de cualquier tipo. Quedan excluidos de esta garantía los daños fortuitos o consecuenciales. Asimismo, la garantía no cubre sucesos de fuerza mayor, como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían en función del estado. Algunos estados o jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de los daños fortuitos o consecuenciales, ni la limitación sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso. Esta garantía es una adición a sus derechos legales como consumidor. La garantía anterior no podrá alterarse, a menos que se realice por escrito y con la firma de ambas partes.

Explicación de los símbolos

	Indica que el artículo es un producto sanitario.
	Indica un soporte que contiene información de identificador de dispositivo único.
	Indica que el producto no debe desecharse como residuo sin clasificar, sino que debe enviarse a instalaciones de recogida selectiva para su recuperación y reciclaje.
	Indica el número de catálogo del fabricante para poder identificar el producto sanitario.
	Indica el número de catálogo del fabricante para que se pueda identificar el producto sanitario.
	Indica el fabricante del producto sanitario.
	Este símbolo indica la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso.
	Este símbolo indica que es necesario tener precaución al manejar el dispositivo o control cerca de donde está colocado el símbolo, o que la situación actual requiere la concienciación o la actuación del operador para evitar consecuencias indeseables.
	Identificar un lugar donde se puede encontrar información, especialmente en caso de emergencia.
	Indica los límites de temperatura a los que se puede exponer con seguridad el producto sanitario.
	Indica el rango de humedad al que el producto sanitario puede exponerse con seguridad.

Solución de problemas

- Si aparecen dos luces naranjas una vez cada 10 s, intente esto:
Cambie las pilas. Utilice solo pilas alcalinas o de litio AA de 1,5 V (LR6).
- Si Aparece una luz verde en el monitor para bebés, pero el receptor no se activa, intente esto:
 - Compruebe las pilas y conexiones del monitor para bebés y el receptor.
 - Acerque el receptor al monitor para bebés.
 - Compruebe que el monitor para bebés y el receptor están ajustados en la misma clave de radiofrecuencia. Consulte **Cambiar la clave de radio** en nuestra página web.
- Si el monitor para bebés no se activa ni cuando el bebé llora, intente esto:
 - Acerque el monitor para bebés al bebé o aumente la sensibilidad del micrófono; consulte **Ajustes**.
 - **¡Atención!** Asegúrese en todo momento de que el monitor para bebés está fuera del alcance del niño. Nunca coloque el monitor para bebés en la cuna o el parque del niño.
- Si el monitor para bebés se activa con demasiada facilidad, intente esto:
Reduzca la sensibilidad o aleje el monitor para bebés de la cuna; consulte **Ajustes**.

- Si el monitor para bebés tarda muy poco en activarse, intente esto:
Aumente el tiempo de retardo. Para obtener más información, lea el apartado **Ajustes**.
- Si el monitor para bebés tarda demasiado en activarse, intente esto:
Reduzca el tiempo de retardo. Para obtener más información, lea el apartado **Ajustes**.
- Si el receptor se activa sin motivo, intente esto:
Es posible que otro sistema Visit cercano active su sistema. Cambie la clave de radio de todas las unidades. Consulte **Cambiar la clave de radio** en nuestra página web.

Especificaciones técnicas

- **Dimensiones:** 100 × 65 × 27 mm, 4,0 × 2,6 × 1,1"
- **Peso:** 118 g, 4.2 onzas incluidas las pilas
- **Alimentación y pilas:** Pilas: 2 × 1,5 V AA (LR6) de litio o alcalinas. Consumo de energía: Activo < 70 mA, posición de reposo < 400 µA. Tiempo de funcionamiento: Alcalina ~ 6 meses, litio ~ 1 año
- **Activación.** A través de los botones de prueba, el micrófono o una alfombrilla de contacto a través de la entrada de activación externa
- **Potencia de salida máxima:** 4,7 dBm
- **Frecuencia de radio:** 868,30MHz
- **Cobertura:** 50 - 250 m (55-273 yd), dependiendo de las características del edificio.
- **Número de claves de radio:** 64 como estándar. Hasta 256 con software opcional.
- **Requisitos ambientales:** Temperatura de funcionamiento: 0° to 35° C, (32° to 95° F). Rango de humedad: 15% to 95% RH (sin condensación)
- **Configuración:** Este transmisor puede utilizarse con todos los receptores Visit
- **Contenido de la caja**
 - BE1491-868 Vigilabebés Visit
 - Pilas alcalinas 2 × 1.5 V AA (LR6)
 - Soporte para mesa premontado, tornillos y tacos
- **Accesorios:** BE9026-P02 Esterilla de Contacto

Información sobre el cumplimiento

Por la presente, Bellman & Symfon declara que, en Europa, este producto cumple los requisitos esenciales del Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios y la Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos. El texto completo de la declaración de conformidad puede obtenerse en el sitio web de Bellman & Symfon bellman.com.

—