



BÁSCULA DE BAÑO PARLANTE KE10426SE
MANUAL DE USUARIO



La báscula de baño parlante KERO KE10426S permite visualizar en la pantalla el peso a la vez que lo anuncia por voz.

Características:

- Anuncio por voz del peso en español o inglés
- Indicación del peso en pantalla
- Peso máximo: 150 Kg / 330 Lb
- Resolución: 0.1 Kg / 0.2 Lb
- Alimentación: pila 9V
- Tolerancia: $\pm 1\%$
- Selección de idioma (español/inglés) mediante interruptor en la base
- Selección de Kg o Lb mediante pulsador en la base
- Desactivación del anuncio por voz mediante interruptor en la base
- Apagado automático

Funcionamiento:

Instalación de la pila:

Para utilizar su báscula parlante deberá instalar, en primer lugar, la pila de 9 V adjunta. Debe colocarse en el compartimento para la pila ubicado en la base. Asegúrese de mantener la polaridad correcta tal como se indica junto a la tapa de dicho compartimento.

Cómo pesarse:

- Coloque la báscula sobre suelo firme y nivelado.
- Para encenderla, haga presión con el pie sobre la báscula.
- La báscula anunciará: "HOLA". Tras unos instantes, estará lista para pesar y anunciará: "BASCULA PREPARADA"
La pantalla indicará 0 Kilos (o libras).
- Súbase a la báscula y permanezca inmóvil.
- Aparecerá el peso en la pantalla a la vez que se anuncia por voz.
- Cuando baje de la báscula, esta se apagará de forma automática después de unos segundos. Al hacerlo, anunciará: "ADIÓS".

La báscula de baño viene lista para su funcionamiento. Simplemente tiene que instalar la pila y comenzar a utilizarla.

Por defecto, la báscula habla en español y el peso se refleja en Kilos.

A continuación se detalla cómo cambiar la configuración de fábrica.

Selección de la unidad de medida (Kg/Lb)

Esta báscula permite realizar las pesadas en kilos o libras. Para cambiar la unidad de medida, utilice el pulsador circular de la base con la báscula encendida. La selección permanecerá hasta nuevo cambio. Por defecto se suministra en kilos. En la base hay dos interruptores y, entre ambos, un pulsador circular. Este pulsador es el que permite el cambio de unidades.

Desactivación del altavoz:

Si desea desactivar el altavoz, deberá cambiar la posición del interruptor situado a la derecha del pulsador circular de la base. Por defecto, se suministra con el altavoz activado.

Cambio de idioma:

Por defecto la báscula se suministra en español. Puede cambiar a inglés mediante el interruptor situado a la izquierda del pulsador circular de la base. El cambio de idioma será efectivo al apagar y encender de nuevo la báscula.

NOTAS:

- Colóquese sobre la báscula con cuidado para evitar caídas.
- En caso de sobrecarga, la pantalla mostrará "FFFF".
- Si la báscula no habla, verifique que la batería no esté agotada.
- Coloque la báscula sobre una superficie sólida y plana.
- No sumerja la báscula en agua. Para limpiarla utilice un paño húmedo.
- Evite golpes contra la báscula.
- En caso de tiempo prolongado sin usar, recomendamos retirar la pila.
- No desmonte la báscula ya que la garantía perdería su validez.
- Este producto está destinado a uso doméstico. No apto para uso comercial.

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

SICSA FUTURO, S.A.
CL Mallorca, 214, E08008 - Barcelona - España

De acuerdo con la directiva 2014/30/EU sobre compatibilidad electromagnética

Declara que:

EQUPO: Báscula de baño parlante para uso personal
MARCA: KERO
MODELO: KE10426SE

es conforme con los requerimientos recogidos en las normas siguientes y que le son de aplicación:

EN 6100-6-3: 2007 + A1: 2011
EN 61000-6-1: 2007

El equipo ha sido diseñado garantizando el cumplimiento de las secciones relevantes de las especificaciones referenciadas anteriormente. Esta unidad cumple con los requerimientos esenciales de la Directiva y, por tanto, incorpora el marcado CE.

