

BÁSCULA DE BAÑO PARLANTE KERO KTC1918



Índice

Contenido del producto.....	3
Características.....	3
Instalación de las pilas.....	3
Cómo pesarse.....	3
Configuración	3
Cambiar unidad de medida (Kg/Lb):	3
Advertencias y recomendaciones.....	3
Declaración CE de Conformidad	5

Contenido del producto

- Báscula parlante KERO modelo 1918.
- Manual de instrucciones.
- Pilas AAA incluidas.

Características

- Activación automática.
- Anuncio de peso por voz en español.
- Pantalla con indicación del peso.
- Peso máximo 180 Kg./ 397 Lb.
- Resolución: 0,1 kg.
- Alimentación: 4 pilas AAA.
- Tolerancia $\geq 1\%$
- Selección de unidad: Kg / Lb.
- Apagado automático.

Instalación de las pilas

1. Gire la báscula y localice el compartimento de las pilas.
2. Inserte 4 pilas AAA respetando la polaridad (+/-) indicada.
3. Cierre bien la tapa del compartimento

Cómo pesarse

1. Coloque la báscula en una superficie firme y nivelada (evite alfombras).
2. Súbase descalzo y sin moverse bruscamente.
3. La báscula se encenderá automáticamente.
4. El peso se mostrará en pantalla y se anunciará por voz.
5. Al bajarse, la báscula se apagará automáticamente tras unos segundos.

Configuración

Cambiar unidad de medida (Kg/Lb)

- Pulse el botón en la base con la báscula encendida. La báscula anunciará la unidad de medida seleccionada.
- La selección quedará guardada hasta que se cambie nuevamente.
- Valor por defecto: Kg.

Advertencias y recomendaciones

- No subirse bruscamente. Evite caídas.
- Si la pantalla muestra "oL", indica sobrecarga.
- Si no se escucha la voz, revise las pilas.
- No mojas ni sumergir. Para limpiar, use un paño húmedo.

- Evite golpes o caídas.
- Retire las pilas si no va a usar la báscula durante un tiempo prolongado. Si las baterías están agotadas, la pantalla mostrará "Lo".
- No desmonte el equipo. Perderá la garantía.
- Uso exclusivo doméstico. No apto para uso profesional.

Declaración CE de Conformidad

SICSA, S.A.

C/ Mallorca, 214

08008 – Barcelona – España

Declara bajo su exclusiva responsabilidad que el siguiente producto:

- **Nombre del equipo:** Báscula de baño parlante para uso personal.
- **Marca:** KERO.
- **Modelo:** 1918.
- **Descripción:** Báscula electrónica con anuncio de peso por voz y pantalla digital.

Cumple con las disposiciones de las siguientes directivas de la Unión Europea:

- **2014/30/EU** – Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC).
- **2011/65/EU** – Restricción de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS II).

Y se ha evaluado conforme a los siguientes estándares armonizados aplicables:

- **EN 55014-1 / EN 55014-2** – Requisitos para electrodomésticos y equipos similares.

El equipo ha sido diseñado y fabricado siguiendo los principios de buena práctica de ingeniería, y cumple con los requisitos esenciales de las directivas mencionadas. Por ello, este producto incorpora el marcado CE.

Fecha: 30 de julio de 2025.

Lugar: Barcelona España.