



**GUÍA INDICADOR DE NIVEL DE LÍQUIDO DK205 –
VIBRANTE Y SONORO**

Índice

Descripción general.....	3
Orientación	3
Parte superior.....	3
Interior.....	3
Parte trasera.....	4
Advertencia especial	4
Puesta en marcha	4
Uso del Indicador de nivel de líquido	4
Sustitución de la batería	4
Especificaciones técnicas.....	4
Consejos útiles.....	5
Prueba de batería.	5
Prueba de funcionamiento	5
Almacenamiento	5
Limpieza de las sondas.....	5

Por razones de higiene, este producto no es retornable a menos que presente un fallo, o puede devolverse en un plazo de 14 días si resulta inadecuado, siempre que esté sin abrir y en condiciones de nuevo.

Si el artículo no es adecuado y cumple los requisitos de estar sin abrir y en perfecto estado, póngase en contacto con nosotros en un plazo de 14 días desde su recepción para tramitar su devolución.

Nota importante: comprobar que funciona antes de usarlo: antes de cada uso, se recomienda probar el dispositivo con agua fría para asegurarse de que la batería tiene suficiente carga y que el aparato funciona.

Descripción general

Dispositivo compacto y ligero con tres sondas metálicas que indican dos niveles distintos de líquido dentro de una taza o vaso.

Por ejemplo, puede utilizarse para llenar una taza con agua caliente hasta el primer nivel (para té o café) y después completarla con leche hasta que se detecte el segundo nivel.

Cuenta además con dos pequeños imanes integrados en la carcasa de plástico, que permiten guardarlo adherido a superficies metálicas como la puerta del frigorífico o un microondas cuando no se está utilizando.

Orientación

Coloque el indicador con las tres sondas mirando hacia abajo y hacia Ud., situado sobre una mesa.

Parte superior

Justo debajo del borde superior recto de la carcasa hay dos imanes integrados. Debajo de estos se encuentra un logotipo en relieve de RNIB, y a la derecha una hendidura circular. Esta abertura está sobre el altavoz interno y permite la salida de los tonos del dispositivo.

A mitad de camino hacia abajo, hay 8 líneas con relieve que llegan hasta el borde inferior.

En la parte inferior hay una hendidura semicircular: puedes tirar de ella hacia arriba para acceder al compartimento de la batería.

Interior

Al levantar la pestaña superior podrás tocar la batería y una pequeña hendidura destinada a facilitar la extracción e inserción de una batería nueva.

Parte trasera

Da la vuelta al dispositivo apoyándolo sobre su superficie superior, con las sondas hacia ti. Las tres sondas metálicas ocupan la mayor parte de esta superficie.

Advertencia especial

Para detectar los niveles de líquido, las sondas deben estar siempre situadas en el borde interior de la taza o vaso.

Puesta en marcha

Sujete la lengüeta de la batería y tire de ella para activarla. Al hacerlo, escuchará tres pitidos y una vibración, lo que indica que la batería está correctamente instalada y que el dispositivo está listo para usar.

La lengüeta retirada puede desecharse.

Uso del Indicador de nivel de líquido

Cuelgue el dispositivo en el borde de su taza o vaso, con las tres sondas metálicas en el interior.

Vierta el líquido (frío o caliente) lentamente y deténgase en cuanto escuche la primera serie de pitidos intermitentes con vibración.

Sustitución de la batería

Para retirar la batería:

1. Sujete el dispositivo con el lado plano hacia Ud.
2. Abra la tapa del compartimento introduciendo un dedo en la hendidura semicircular de la parte inferior y tirando hacia arriba.
3. Sentirá la batería y la hendidura para ayudarle a retirarla e insertar una nueva.
 - La batería de repuesto debe ser 1 x AAA.
 - Inserte la batería con el polo negativo (plano) hacia el muelle, que está ubicado en la parte superior.
 - Una vez instalada correctamente, escuchará los pitidos de confirmación.
 - Cierre la tapa.

Especificaciones técnicas

- Dimensiones: 60 mm x 35 mm x 29 mm
- Peso: 29 g (incluyendo batería)
- Batería: 1 x AAA.

Consejos útiles

Prueba de batería.

Se recomienda probar regularmente el dispositivo con agua fría para garantizar que la batería tiene suficiente carga.

Esto evita posibles desbordamientos de agua caliente si el indicador fallara por falta de energía.

Prueba de funcionamiento

Una vez comprobada la batería, puede verificar que el dispositivo detecta correctamente los líquidos:

- Humedezca un dedo y colóquelo sobre las tres sondas: el dispositivo emitirá un tono continuo.
- O bien coloque el dispositivo en el borde de una taza y llénelo con agua fría hasta que emita el pitido.

Con esta prueba, podrá usarlo con líquidos calientes con mayor tranquilidad.

Almacenamiento

- Se recomienda guardar el dispositivo usando los dos imanes incorporados.
- Para evitar descargas accidentales de la batería, no guardes el dispositivo en un cajón con cubiertos.
- Guardarlo en una bolsa o caja de plástico también previene este problema.

Limpieza de las sondas

- Limpie las sondas con un paño húmedo.
- Nunca sumerja el dispositivo.
- No utilice limpiadores abrasivos, alcohol, disolventes o productos corrosivos.

Fecha: junio de 2025.