

Descripción del equipo

Únicamente se describen las partes significativas del equipo.

- Cara frontal. Centrado, en la parte más cercana al usuario se encuentra un botón circular con el que se iniciarán o detendrán las mediciones. A la derecha de este se encuentra el altavoz. Por encima de ambos, tres botones rectangulares que de izquierda a derecha son “-“ “M” y “+”. El resto de la zona lo ocupa la pantalla.

- Cara izquierda. En su centro se encuentra el conector del brazalete.
- Cara derecha. En su centro se encuentra el conector de alimentación.
- Cara inferior. Se encuentra el compartimento de las pilas.

Al extraer las pilas, inmediatamente se pierde la configuración de fecha, hora e idioma, queda por defecto en inglés, teniendo que volver a configurarlo. En el momento que las pilas quedan correctamente instaladas en el equipo, este emitirá un mensaje en inglés de presentación.

Se describe el proceso para cambiar el idioma a español, ya que el menú no dispone de respuesta de voz; siga los siguientes pasos: Mantenga pulsada la tecla “M” durante 8 segundos. Pulse y suelte la tecla “M” 5 veces, pulse una vez la tecla “+”, por último pulse el botón circular.